

NÁVOD K OBSLUZE

BeautyRelax BR-3147

BEAUTYRELAX BODYFACE HIFU COOL ATTACK STUDIO



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
KDY PŘÍSTROJ NENÍ MOŽNÉ POUŽÍVAT	6
DOPORUČENÉ PARTIE APLIKACE	8
POUŽITÍ SONOGELU	8
VLASTNOSTI PŘÍSTROJE	9
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	10
POPIS PŘÍSTROJE	11
POPIS APLIKAČNÍ HLAVICE	13
VÝMĚNA APLIKÁTORU/SONDY	14
POPIS DISPLEJE	15
TEST NASTAVENÍ ENERGIE	16
DIAGRAM ENERGETICKÝCH BODŮ	17
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	18
DOPORUČENÉ POČTY PULZŮ	21
ŽIVOTNOST APLIKAČNÍ HLAVICE	22
ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU	24
POSTUP DOPLNĚNÍ VODY	26
TECHNICKÉ PARAMETRY	27
OBSAH BALENÍ	28
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	29
CERTIFIKACE	29
EU DISTRIBUTOR	29
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	30

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením přístroje do provozu si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze, seznamte se s jednotlivými funkcemi přístroje a přiloženými ilustracemi. Návod uschovejte pro případné budoucí použití. Instalaci i obsluhu provádějte výhradně podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Tento přístroj je určen výhradně pro **kosmetické a estetické účely**. Nejedná se o zdravotnický prostředek ani prostředek určený k diagnostice, léčbě, prevenci nebo zmírňování onemocnění či jiných zdravotních obtíží.
- Přístroj je určen k neinvazivní kosmetické aplikaci pokožky při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu. Výsledky aplikace jsou individuální a mohou se u jednotlivých osob lišit.
- Přístroj nepoužívejte na porušenou, podrážděnou, zanícenou nebo jinak poškozenou pokožku ani na místech, kde jeho použití není doporučeno v tomto návodu.
- Pokud si nejste jisti vhodností použití přístroje vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo aktuálnímu stavu pokožky, doporučujeme jeho použití předem konzultovat s lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.
- Používá-li přístroj více osob, dodržujte odpovídající hygienická pravidla. Po každém použití doporučujeme očistit aplikační hlavici vhodným dezinfekčním prostředkem určeným pro kosmetické přístroje podle pokynů výrobce dezinfekčního prostředku.
- Při zjištění mechanického poškození, netěsnosti, nestandardního chování, neobvyklého zvuku, zápachu nebo jiné závady přístroj okamžitě vypněte, odpojte od elektrické sítě a dále jej nepoužívejte.
- Nikdy se nedotýkejte vnitřních částí přístroje ani se nepokoušejte zařízení rozebírat. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení.
- Pokud přístroj spadne nebo utrpí náraz, doporučujeme před dalším použitím nechat ověřit jeho technický stav autorizovaným servisem.
- Přístroj používejte pouze v suchém, čistém a dobře větraném prostředí. Nepoužívejte jej v bezprostřední blízkosti vany, sprchy, umyvadla, bazénu ani jiných zdrojů vody.
- Hlavní jednotka přístroje není vodotěsná. Zabraňte kontaktu přístroje s vodou nebo jinými kapalinami. Přístroj neponořujte do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Přístroj během provozu nenechávejte bez dozoru. Po ukončení práce jej vždy vypněte hlavním vypínačem a odpojte od elektrické sítě.
- Pokud byl přístroj přemístěn z chladného prostředí do teplého, ponechte jej před zapnutím aklimatizovat minimálně 3 hodiny, aby nedošlo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř zařízení.

- Přístroj není určen k používání dětmi ani osobami, které nejsou schopny bezpečně porozumět jeho obsluze nebo jej používat bez odpovídajícího dohledu.
- Přístroj neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, otevřeného ohně ani na místa vystavená vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření.
- Během provozu nezakrývejte ventilační otvory přístroje. Zajistěte dostatečný prostor pro odvod tepla podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Přístroj skladujte v suchém, čistém prostředí chráněném před prachem, vlhkostí a extrémními teplotami.
- K přístroji používejte pouze výrobcem doporučené příslušenství, kartuše, aplikační hlavice a další spotřební materiál.
- Neprovádějte žádné konstrukční úpravy přístroje ani jeho příslušenství. Neautorizované zásahy mohou vést ke ztrátě bezpečnosti zařízení i záruky.
- Výrobce ani distributor neodpovídají za škody vzniklé používáním přístroje v rozporu s tímto návodem, používáním v rozporu s určeným účelem nebo použitím neoriginálního příslušenství.
- Za bezpečný provoz přístroje, dodržování hygienických požadavků, odbornou způsobilost obsluhy a splnění všech povinností vyplývajících z platných právních předpisů odpovídá provozovatel zařízení.
- Hygienický režim pracoviště, dezinfekce, manipulace s příslušenstvím a provoz kosmetických služeb musí být v souladu s aktuálně platnými právními předpisy a požadavky příslušných orgánů ochrany veřejného zdraví.
- Přístroj je určen výhradně k poskytování **neinvasivní kosmetické aplikace**. Veškeré informace uvedené v tomto návodu mají informativní charakter a nelze je považovat za zdravotní doporučení. Přístroj není určen k léčbě, diagnostice, prevenci ani zmírňování onemocnění nebo zdravotních obtíží.
- Kosmetické účinky přístroje jsou individuální, závisí na řadě faktorů (například typu pokožky, věku, životním stylu nebo pravidelnosti používání) a nelze je předem zaručit.

KDY PŘÍSTROJ NENÍ MOŽNÉ POUŽÍVAT

Použití přístroje **BeautyRelax** se **nedoporučuje** nebo vyžaduje **zvýšenou opatrnost** v následujících případech. Přístroj je určen **výhradně ke kosmetickým účelům** a **není zdravotnickým prostředkem**.

ZDRAVOTNÍ A FYZIOLOGICKÉ STAVY

Použití přístroje se **nedoporučuje** u osob:

- s **akutním infekčním nebo virovým onemocněním**
- při **zvýšené tělesné teplotě (horečka)**
- s **neléčeným nebo nestabilním vysokým krevním tlakem**
- s **diabetem v pokročilém nebo komplikovaném stadiu**
- s **poruchami citlivosti pokožky** v místě aplikace
- s **poruchami srážlivosti krve**
- v období **těhotenství**
- u osob s **epilepsií**
- u osob s **onemocněním srdce**, zejména pokud mají implantovaný **kardiostimulátor** nebo jiný elektronický implantát

IMPLANTÁTY A CIZÍ MATERIÁLY V TĚLE

Použití přístroje se **nedoporučuje**:

- v místech, kde se nachází **kovové implantáty, šrouby, destičky nebo jiné cizí předměty** uložené bezprostředně pod povrchem pokožky
- toto omezení se **nevztahuje na zubní implantáty**, pokud nejsou v oblasti aplikace

STAV POKOŽKY V MÍSTĚ APLIKACE

Přístroj **nepoužívejte** nebo aplikaci **odložte**, pokud je pokožka v místě aplikace:

- **poraněná, podrážděná, zanícená**
- s otevřenými ranami, oděrkami, popáleninami nebo jizvami v procesu hojení
- s **aktivním akné v zánětlivém stadiu** (bolestivé zanícené projevy)
- s **kožním onemocněním** (např. ekzém, dermatitida, lupénka) v aktivní fázi
- krátce po **chirurgickém nebo estetickém zákroku**, dokud není pokožka plně zhojena

DALŠÍ OMEZENÍ

- Přístroj **není určen pro děti**
- Přístroj není určen osobám, jejichž **fyzická nebo psychická kondice** neumožňuje bezpečné použití přístroje
- Přístroj se **nesmí používat na oblasti**:
 - nad **štítnou žlázou**
 - v oblasti **srdce**
 - přímo nad **velkými nervovými svazky**
 - na **kostní výčnělky**

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- V případě jakýchkoliv pochybností o vhodnosti použití přístroje se **doporučuje konzultace s lékařem**.
- Přístroj **nenahrazuje lékařskou péči** a **není určen k diagnostice ani léčbě jakéhokoli onemocnění**.
- Výsledky aplikace jsou **individuální** a mohou se lišit v závislosti na stavu pokožky, životním stylu a dodržování doporučených postupů.

DOPORUČENÉ PARTIE APLIKACE

- Čelo
- Tváře
- Podbradek
- Břicho
- Paže
- Záda
- Hrudník
- Stehna
- Hýždě



POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem. Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Radiofrekvenční vlny a ultrazvuk se tak mohou na pleť lépe navázat. Nepoužívejte žádné jiné kosmetické přípravky.




VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

- Technologie **Frozen HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)** s aktivním chlazením aplikační hlavice.
- Integrovaný **polovodičový chladicí systém** s rozsahem chlazení **1–5 °C** pro vyšší komfort během kosmetické aplikace.
- **Neinvazivní kosmetická aplikace** bez narušení povrchu pokožky.
- **Klouzavá metoda aplikace (Sliding HIFU)** umožňující plynulý pohyb hlavice po pokožce.
- Celkem **9 dostupných pracovních hloubek**: 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,5 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm, 13,0 mm a 16,0 mm.
- Výměnné aplikační kartuše s automatickou identifikací připojené hlavice.
- Životnost každé kartuše až **62 000 pulzů**.
- Barevný **15" kapacitní dotykový displej** pro ovládání přístroje.
- **2,8" displej** přímo na pracovní rukojeti zobrazující aktuální nastavení a informace o kartuši.
- Plynulé nastavení energie v rozsahu **10–100 %**.
- Nastavení pracovní frekvence v rozsahu **1–10 Hz**.
- Doporučená pracovní frekvence **6–8 Hz**.
- Funkce **START / PAUSE** pro pohodlné řízení průběhu aplikace.
- Počítadlo celkového i aktuálního počtu výstřelů.
- Možnost zapnutí nebo vypnutí **chladicího systému**.
- Vodní chladicí okruh s doporučenou pravidelnou výměnou čisté vody.
- Ergonomická pracovní rukojeť s rychlou výměnou aplikačních kartuší **Plug & Play**.
- Automatické rozpoznání hloubky připojené kartuše bez nutnosti manuální konfigurace.
- Určeno pro kosmetickou aplikaci **obličeje a vybraných partií těla**.

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Bodyface HIFU Cool Attack Studio je profesionální estetický přístroj určený pro neinvazivní kosmetická ošetření obličeje, krku a vybraných partií těla. Využívá technologii Cool HIFU, která kombinuje fokusovaný ultrazvuk s aktivním kontaktním chlazením aplikační hlavice v rozsahu 1–5 °C. Přístroj umožňuje kosmetické ošetření v různých pracovních hloubkách od 1,5 mm do 16,0 mm prostřednictvím výměnných aplikačních kartuší určených pro jednotlivé oblasti použití. Aktivní chladič systém přispívá k vyššímu komfortu během aplikace a umožňuje příjemnější průběh kosmetického ošetření. Každá aplikační kartuše disponuje životností až 62 000 pulzů. Přístroj je vybaven přehledným dotykovým ovládáním, ergonomickou pracovní rukojetí a výměnnými kartušemi pro kosmetická ošetření obličeje i těla. BeautyRelax Bodyface HIFU Cool Attack Studio je určen pro použití v kosmetických salonech, estetických studiích a dalších provozovnách poskytujících profesionální kosmetické služby. Přístroj je určen výhradně pro kosmetické účely. Nejedná se o zdravotnický prostředek a není určen k diagnostice, léčbě, prevenci ani zmírňování onemocnění nebo jiných zdravotních obtíží. Výsledky kosmetického ošetření jsou individuální a mohou se u jednotlivých osob lišit.

POPIS PŘÍSTROJE

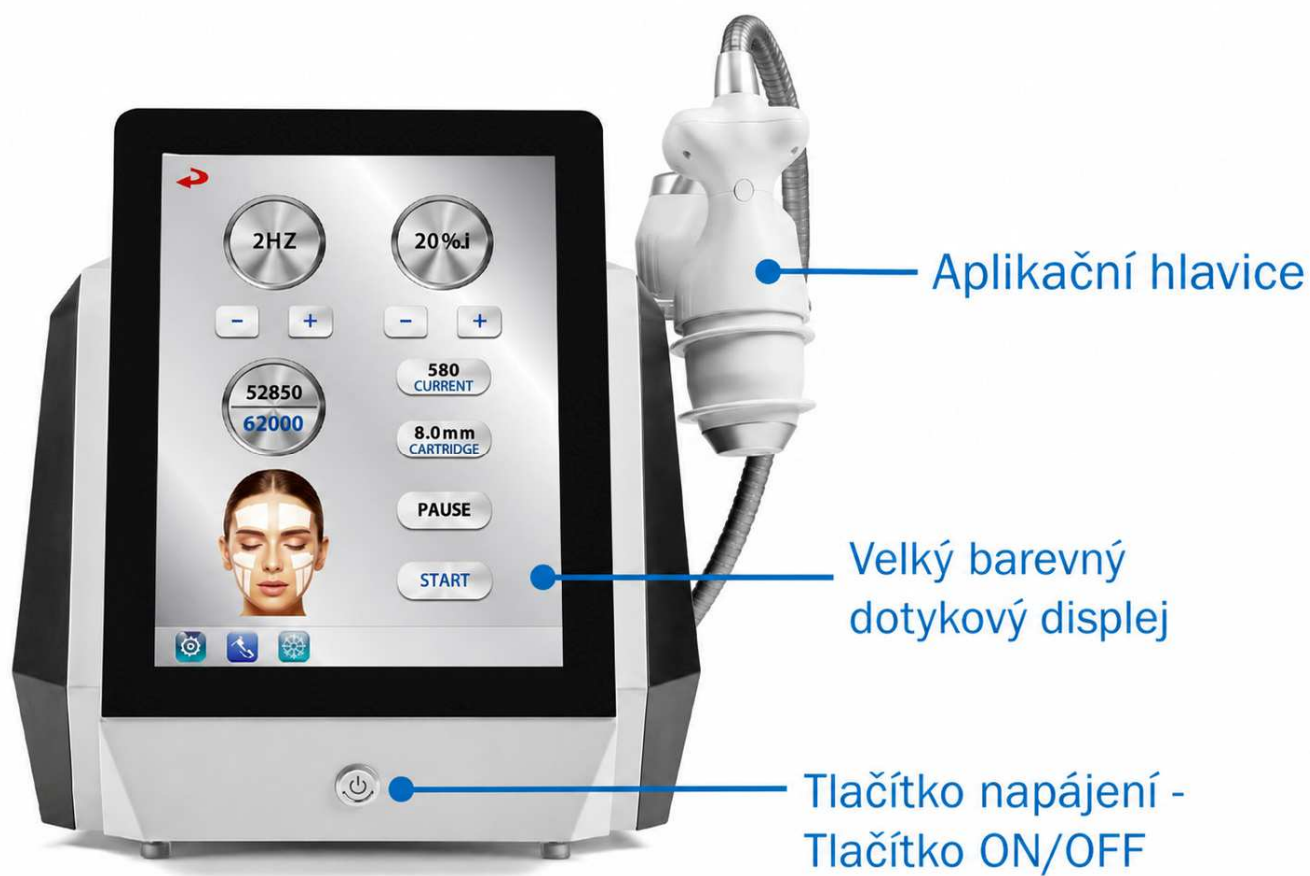


POPIS PŘÍSTROJE



POPIS APLIKAČNÍ HLAVICE



VÝMĚNA APLIKÁTORU/SONDY

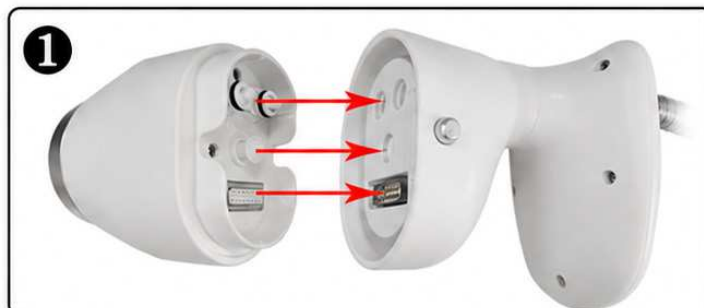

– Zarovnejte odpovídající otvory.



– Zarovnejte sondu s rukojetí a zasuňte ji přímo v jedné linii.



– Ujistěte se, že je spojení pevně zacvaknuto.




– Vyměňte sondu.



– Nejprve stiskněte a podržte zajišťovací tlačítko a poté vytáhněte sondu přímo v jedné linii.

POPIS DISPLEJE

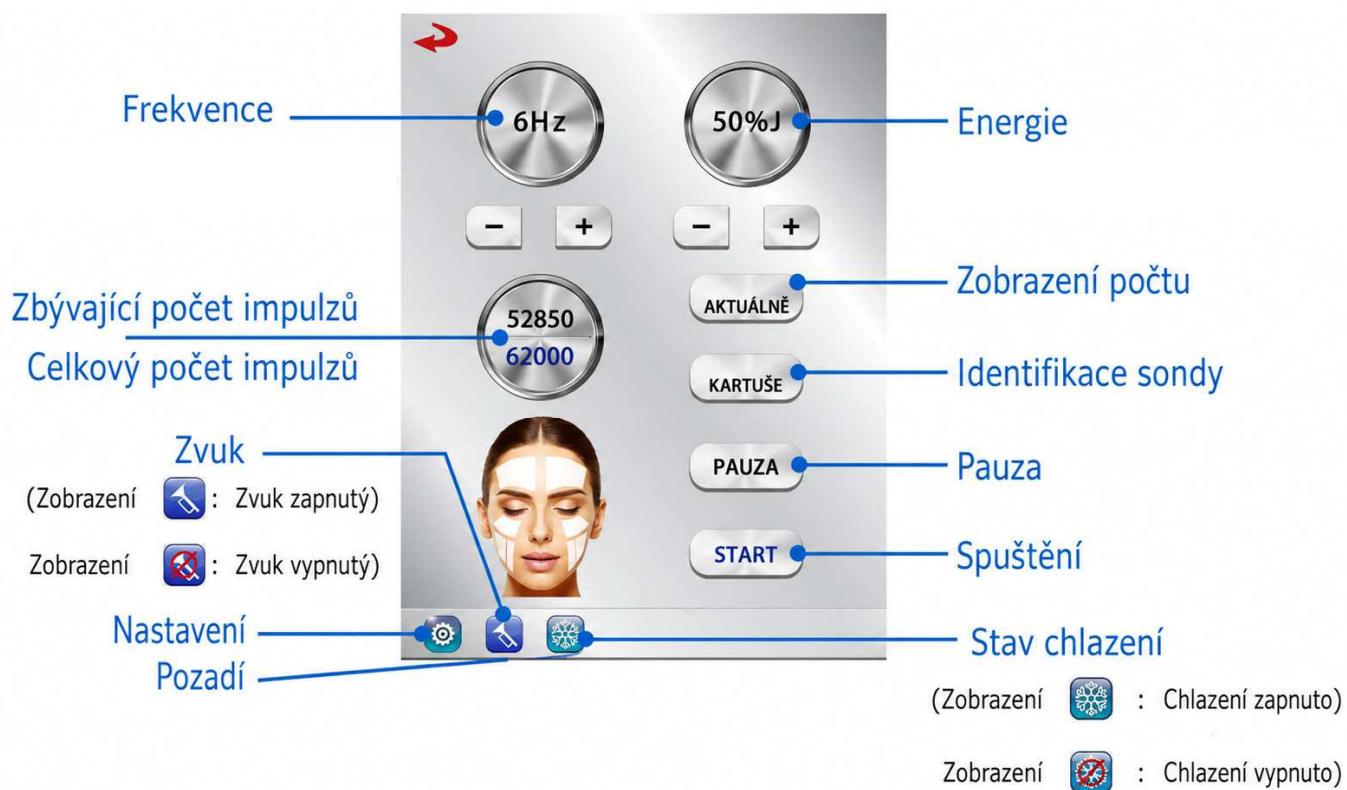

TEST NASTAVENÍ ENERGIE



- Energie je nastavena na 100 % J.



- Klikněte na START.



- Na hlavici naneste gel.



- Gel rozetřete rovnoměrně akrylovou destičkou tak, aby uprostřed nezůstaly žádné vzduchové bubliny.



- Stiskněte provozní tlačítko na rukojeti pro vyzařování energie.



- Nebo použijte vodu v lahvi a ověřte výš vody přibližně 5 mm.

DIAGRAM ENERGETICKÝCH BODŮ

Diagram energetických bodů

– Rychlý pohyb 3 cm za 1 sekundu


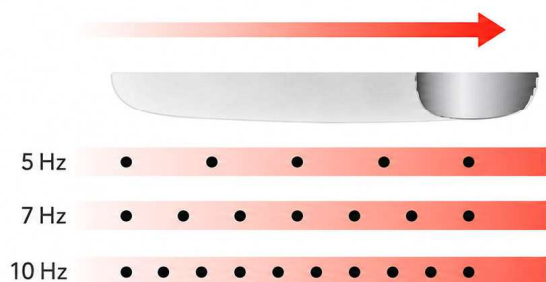


Diagram energetických bodů

– Pomalý pohyb 3 cm za 2 sekundy

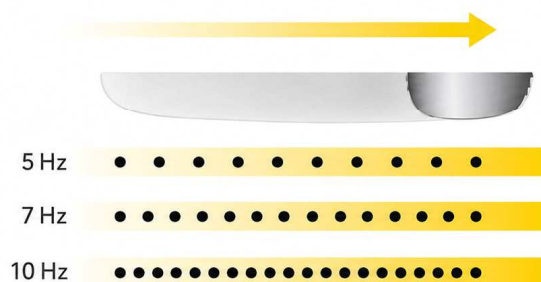

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Fáze 1: Příprava klienta a přístroje

Vstupní konzultace

Před zahájením kosmetické aplikace doporučujeme provést vstupní konzultaci a posoudit vhodnost použití přístroje s ohledem na aktuální stav klienta. Přístroj není vhodné používat v případech uvedených v kapitole **Kontraindikace** tohoto návodu. V případě jakýchkoliv pochybností o vhodnosti použití doporučujeme konzultaci s lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.

Příprava pokožky

Aplikovanou oblast důkladně očistěte od make-upu, kosmetických přípravků, mastnoty a dalších nečistot. Pokožka by měla být čistá, suchá a bez známek podráždění.

Vyznačení aplikované oblasti

V případě potřeby lze aplikovat oblast orientačně vyznačit kosmetickou tužkou nebo jiným vhodným hypoalergenním prostředkem. Označení pomáhá zajistit systematický a rovnoměrný postup během aplikace.

Kontrola přístroje

Před každým použitím zkontrolujte technický stav přístroje, správné připojení pracovní rukojeti, dostatečné množství vody v chladicím systému a správné usazení aplikační kartuše. Přesvědčte se, že je přístroj připraven k bezpečnému provozu.

Výběr aplikační kartuše

Vyberte kartuši odpovídající aplikované partii a požadované pracovní hloubce. Přístroj umožňuje použití výměnných kartuší pro kosmetickou aplikaci tváře a vybraných partií těla.

Nastavení přístroje

Po zapnutí přístroje nastavte pracovní parametry podle zvolené aplikační kartuše a aplikované oblasti. Doporučuje se začínat s nižší intenzitou a případně ji upravit podle individuálního komfortu klienta a doporučených pracovních parametrů výrobce.

Fáze 2: Vlastní aplikace

Aplikace vodivého gelu

Na celou aplikovanou oblast naneste souvislou vrstvu ultrazvukového vodivého gelu. Dostatečné množství gelu je nezbytné pro správný kontakt aplikační hlavice s pokožkou a plynulý pohyb během aplikace. Výrobce doporučuje používat výhradně gel určený pro ultrazvukovou kosmetickou aplikaci.

Zkušební aplikace

Před zahájením vlastní aplikace doporučujeme provést několik zkušebních impulzů v méně citlivé oblasti a ověřit komfort klienta. V případě potřeby lze následně upravit pracovní nastavení.

Vlastní postup

Přikládejte aplikační hlavici celou plochou na pokožku a postupujte systematicky po jednotlivých liniích. Hlavici plynule pohybujte po pokožce a nenechávejte ji na jednom místě déle než přibližně dvě sekundy. Doporučuje se dodržovat rovnoměrné rozestupy jednotlivých aplikací a plynulý pracovní postup.

Průběžná kontrola komfortu

Po celou dobu kosmetické aplikace doporučujeme sledovat komfort klienta a v případě potřeby upravit intenzitu nebo rychlost aplikace.

Oblasti, kterým je vhodné se vyhnout

Neprovádějte aplikaci na oční víčka, oční bulvy, oblast štítné žlázy, rty, nos, kostní výběžky, průběh hlavních nervových svazků, velké cévy ani na jiná místa uvedená v kapitole **Kontraindikace a upozornění** tohoto návodu.

Fáze 3: Dokončení aplikace a následná péče

Ukončení aplikace

Po dokončení kosmetické aplikace vypněte přístroj a zbytky vodivého gelu šetrně odstraňte z pokožky.

Závěrečná kosmetická péče

Na aplikovanou oblast lze aplikovat vhodný hydratační nebo zklidňující kosmetický přípravek podle typu pokožky.

Doporučení po kosmetické aplikaci

Po aplikaci se může přechodně objevit mírné zarudnutí, zvýšená citlivost nebo pocit tepla v aplikované oblasti. Tyto projevy bývají obvykle krátkodobé.

Po aplikaci doporučujeme:

- dodržovat dostatečný pitný režim,
- udržovat pokožku hydratovanou vhodnými kosmetickými přípravky,
- chránit pokožku před slunečním zářením vhodným ochranným přípravkem (např. SPF),
- po dobu přibližně jednoho týdne omezit návštěvu sauny, parních lázní, horkých koupelí a dalších zdrojů intenzivního tepla,
- po dobu přibližně jednoho týdne nepoužívat kosmetické přípravky s exfoliačními kyselinami nebo jinými intenzivně působícími aktivními látkami.

Doporučený interval mezi aplikacemi

Další kosmetickou aplikaci doporučujeme plánovat s dostatečným časovým odstupem podle individuálního kosmetického plánu a doporučení v tomto návodu k obsluze.

Čištění a údržba přístroje

Po každém použití očistěte aplikační hlavici a ostatní části přístroje podle pokynů uvedených v kapitole **Údržba**. Pravidelně kontrolujte stav příslušenství a doporučeným způsobem udržujte chladicí systém přístroje.

DOPORUČENÉ POČTY PULZŮ

Orientační počet pulzů (shotů) pro jednotlivé partie těla

Partie	Doporučený počet pulzů
Vnitřní strana paže	100–200 pulzů na jednu paži
Břicho	300–600 pulzů
Boky	150–300 pulzů na jednu stranu
Hýždě	200–400 pulzů na jednu hýždi
Vnitřní strana stehna	150–300 pulzů na jedno stehno
Vnější strana stehna	200–400 pulzů na jedno stehno
Celé stehno	250–500 pulzů na jedno stehno
Zadní strana stehna	200–400 pulzů na jednu nohu

Upozornění: Uvedené hodnoty mají pouze orientační charakter. Skutečný počet pulzů je vždy nutné přizpůsobit velikosti aplikované oblasti, použité aplikační kartuši, zvoleným pracovním parametrům a individuálnímu komfortu klienta. Neprovádějte opakovanou aplikaci na stejném místě bezprostředně po sobě a vždy dodržujte doporučený pracovní postup uvedený v tomto návodu.

ŽIVOTNOST APLIKAČNÍ HLAVICE

Životnost aplikačních kartuší je výrobcem stanovena na **62 000 pulzů (shotů)** pro každou kartuši. Po dosažení tohoto limitu doporučujeme kartuši vyměnit za novou, aby byly zachovány pracovní parametry přístroje a jeho správná funkce.

Omezená životnost kartuší je dána jejich konstrukcí a přirozeným opotřebením vnitřních komponent při opakovaném používání.

Piezoelektrický měnič

Základním prvkem každé HIFU kartuše je piezoelektrický měnič, který převádí elektrickou energii na fokusované ultrazvukové vlnění. Při každém pulzu dochází k velmi rychlým mechanickým kmitům, které postupně způsobují přirozené opotřebení materiálu. S rostoucím počtem pulzů může docházet ke změně vlastností měniče a ke snížení jeho účinnosti.

Akustický systém

Součástí kartuše je akustický systém, jehož úkolem je soustředit ultrazvukovou energii do přesně definované pracovní hloubky. Dlouhodobým používáním může docházet k postupnému opotřebení jednotlivých součástí, což může ovlivnit pracovní vlastnosti kartuše.

Tepelné a mechanické namáhání

Při provozu je kartuše vystavena opakovanému tepelnému i mechanickému zatížení. Přestože je přístroj vybaven aktivním chladicím systémem, dochází během běžného používání k přirozenému opotřebení jednotlivých komponent.

Proč je důležité dodržovat doporučenou životnost

Výrobce stanovuje maximální životnost kartuše s cílem zajistit co nejstabilnější pracovní parametry po celou dobu jejího používání.

Používání kartuše po překročení doporučené životnosti může vést zejména k:

- postupnému snížení stability výstupní energie,
- změně pracovních vlastností aplikační hlavičky,
- méně konzistentnímu průběhu kosmetické aplikace,
- zkrácení životnosti dalších částí přístroje.

Z tohoto důvodu doporučujeme po dosažení výrobcem stanoveného limitu kartuši vyřadit z provozu a nahradit ji novou originální kartuší.

Doporučení

Pravidelně sledujte počet zbývajících pulzů zobrazený na displeji přístroje. Po dosažení limitu **62 000 pulzů** doporučujeme kartuši vyměnit za novou originální kartuši určenou pro model **BeautyRelax Bodyface HIFU Cool Attack Studio**.

Používání originálních aplikačních kartuší pomáhá zachovat správnou funkci přístroje, bezpečný provoz a pracovní parametry stanovené výrobcem.

ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU

1. Čištění po každém použití

Po ukončení kosmetické aplikace doporučujeme aplikační hlavici očistit bezprostředně po použití.

Doporučený postup:

- Odstraňte zbytky ultrazvukového gelu z povrchu hlavice.
- Povrch hlavice otřete měkkým hadříkem nebo utěrkou z mikrovlákn.
- V případě zaschlého gelu použijte lehce navlhčený měkký hadřík a následně hlavici osušte.
- Před uložením musí být hlavice čistá a suchá.

Výrobce doporučuje po každém použití očistit příslušenství a následně jej osušit měkkým hadříkem.

2. Dezinfekce

Používá-li přístroj více osob, doporučuje se po každém použití provést dezinfekci aplikační hlavice vhodným dezinfekčním prostředkem určeným pro kosmetické přístroje.

Doporučený postup:

- Dezinfekční prostředek vždy nanášejte na měkký hadřík nebo jednorázovou utěrku.
- Povrch hlavice jemně otřete.
- Před dalším použitím nechte hlavici důkladně oschnout.

Upozornění: Dezinfekční prostředek nikdy nestříkejte přímo na hlavici ani do konektorů přístroje.

3. Ochrana před vlhkostí

- Aplikační hlavici ani pracovní rukojeť nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Chraňte konektory před vniknutím vlhkosti.
- Po každém čištění všechny části důkladně osušte.
- Přístroj používejte pouze v suchém prostředí.

4. Pravidelná údržba

Pro zachování správné funkce přístroje doporučujeme:

- pravidelně kontrolovat stav aplikačních kartuší,
- kontrolovat čistotu konektorů,
- pravidelně měnit vodu v chladicím systému podle doporučení výrobce (přibližně každých 15 dní při pravidelném používání),
- při delším skladování nebo přepravě vypustit vodu z chladicího systému,
- přístroj skladovat v suchém prostředí při běžné pokojové teplotě.

5. Důležitá upozornění


- Neponořujte aplikační hlavice ani pracovní rukojeť do vody nebo jiných kapalin.
- Nepoužívejte aceton, čpavek, chlor ani jiné agresivní nebo korozivní čisticí prostředky.
- Nepoužívejte abrazivní houbičky, kartáče, drátěnky ani jiné materiály, které by mohly poškodit povrch hlavice.
- Nevystavujte hlavice působení horké vody ani páry.
- Chraňte aplikační hlavice před pádem a silnými nárazy.
- Zabraňte nadměrnému ohýbání kabelu pracovní rukojeti.
- Přístroj nerozebírejte ani neupravujte. Veškeré servisní zásahy svěřte autorizovanému servisu.

Výrobce výslovně upozorňuje, že hlavice jsou přesná zařízení, se kterými je nutné zacházet opatrně, a že k čištění hlavní jednotky ani rukojeti se nesmí používat alkohol ani korozivní rozpouštědla.

Doporučení pro prodloužení životnosti

- Čistěte aplikační hlavici bezprostředně po každém použití.
- Používejte pouze doporučené aplikační gely a originální příslušenství.
- Pravidelně kontrolujte stav hlavic, konektorů a těsnících prvků.
- Sledujte počet zbývajících pulzů jednotlivých kartuší.
- Dodržujte doporučenou výměnu vody v chladicím systému.
- Při delším nepoužívání přístroj odpojte od elektrické sítě a skladujte jej na čistém, suchém místě chráněném před prachem a přímým slunečním zářením.

POSTUP DOPLNĚNÍ VODY

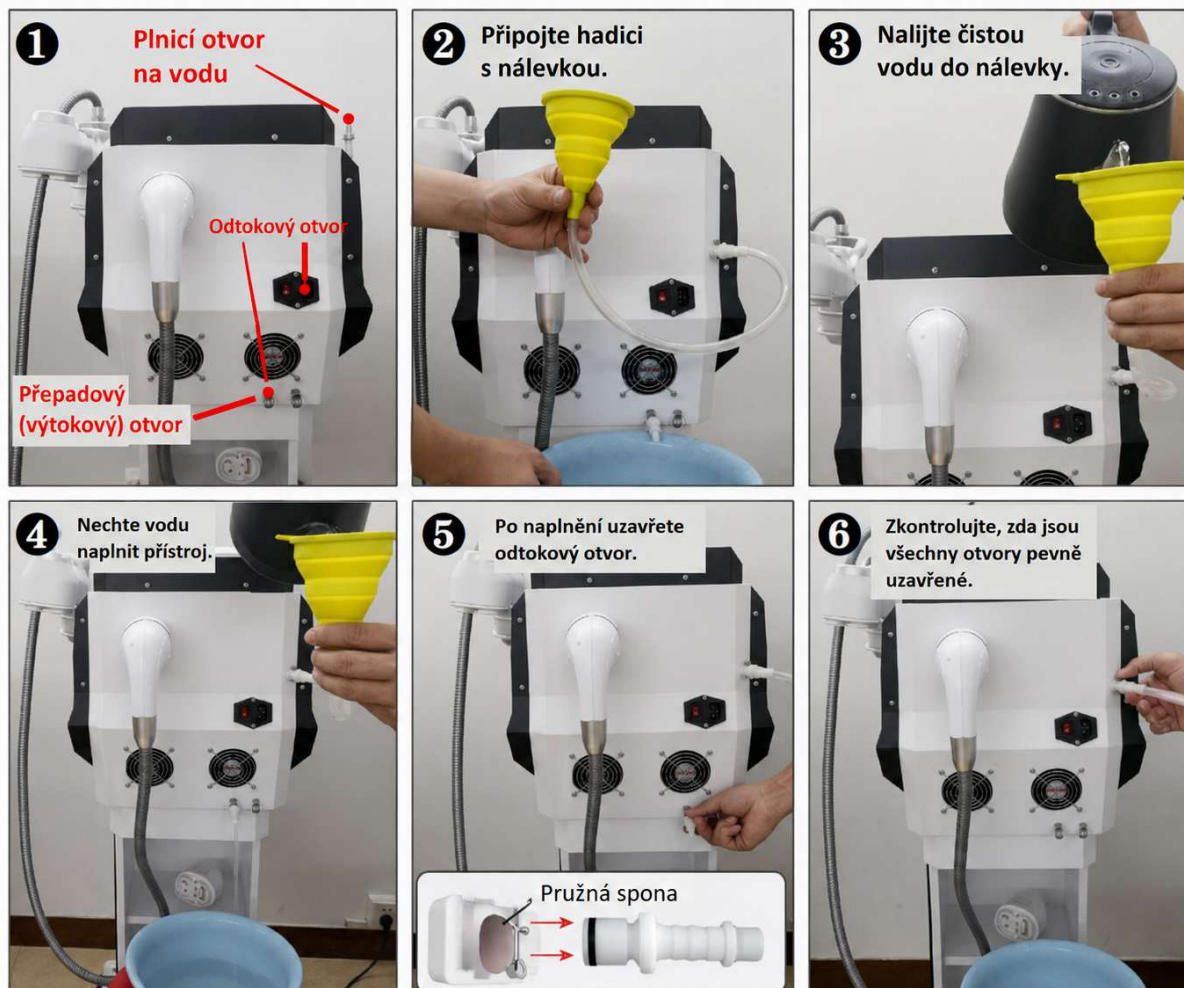

TECHNICKÉ PARAMETRY

Název přístroje: BeautyRelax Bodyface HIFU Cool Attack Studio

Technologie: Cool HIFU (vysokointenzivní fokusovaný ultrazvuk s aktivním kontaktním chlazením)

Typ aplikace: Neinvazivní kosmetické použití

Chladicí systém: Polovodičové kontaktní chlazení

Rozsah chlazení hlavice: 1–5 °C

Pracovní hloubky: 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm / 4,5 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm / 13,0 mm / 16,0 mm

Standardně dodávané kartuše: 2,0 mm, 3,0 mm, 4,5 mm, 13,0 mm, 1,5 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm, 16,0 mm

Pracovní frekvence kartuší:

- 10 MHz (1,5 mm a 2,0 mm)
- 7 MHz (3,0 mm)
- 4 MHz (4,5 mm až 16,0 mm)

Životnost aplikační kartuše: Až 62 000 pulzů

Počet energetických bodů na jeden pulz:

- 2 body (1,5–4,5 mm)
- 4 body (6,0–16,0 mm)

Nastavení energie: 10–100 %

Nastavení pracovní frekvence: 1–10 Hz

Doporučená pracovní frekvence: 6–8 Hz

Výstupní výkon: 10–600 W

Hlavní ovládací displej: 15" kapacitní dotykový LCD

Displej pracovní rukojeti: 2,8" LCD

Napájení: AC 110–220 V

Pojistka: 10 A

Chladicí médium: Čistá voda

Objem chladicího systému: Přibližně 1 500 ml

Doporučená výměna vody: Přibližně každých 15 dní při pravidelném používání

Rozměry přepravního balení: 64 × 47 × 67 cm

Hmotnost: Přibližně 33 kg

OBSAH BALENÍ

- 1× Hlavní jednotka **BeautyRelax Bodyface HIFU Cool Attack Studio**
- 1× Pracovní rukojeť
- 1× Aplikační kartuše **1,5 mm**
- 1× Aplikační kartuše **2,0 mm**
- 1× Aplikační kartuše **3,0 mm**
- 1× Aplikační kartuše **4,5 mm**
- 1× Aplikační kartuše **6,0 mm**
- 1× Aplikační kartuše **8,0 mm**
- 1× Aplikační kartuše **10,0 mm**
- 1× Aplikační kartuše **13,0 mm**
- 1× Aplikační kartuše **16,0 mm**
- 1× Napájecí kabel
- 1× Plnicí trychtýř pro doplnění chladicího systému
- 1× Příslušenství pro plnění a vypouštění chladicí vody
- 1× Návod k obsluze

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

BEAUTYRELAX BODYFACE HIFU COOL ATTACK STUDIO

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-3147**

EAN 8594166124615

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 60335-1 EN 55011:2007

EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Produkt není zdravotnickým prostředkem ve smyslu platných právních předpisů. Je určen výhradně pro neinvazivní kosmetickou aplikaci a profesionální kosmetickou péči o pokožku.

Přístroj není určen k diagnostice, léčbě, prevenci ani zmírňování onemocnění nebo jiných zdravotních obtíží. Při správném používání v souladu s tímto návodem nedochází k narušení povrchu ani integrity pokožky. Veškeré účinky přístroje mají výhradně kosmetický charakter. Výsledky kosmetické aplikace jsou individuální a mohou se u jednotlivých osob lišit a nelze je předem zaručit.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

1.6.2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin Hrbek', is written over a horizontal dotted line.

Martin Hrbek, jednatel