

NÁVOD K OBSLUZE

MASÁŽNÍ KŘESLO NA PÁNEVNÍ SVALY

BeautyRelax BR-3121

BEAUTYRELAX PULSEMAX MAGNETIC STUDIO

PROFESSIONAL



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	3
KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	4
PRO KOHO NENÍ PŘÍSTROJ URČEN	5
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ	6
DŮLEŽITÉ RADY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ	7
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ	8
POPIS PŘÍSTROJE	9
POPIS DISPLEJE	11
PRINCIP FUNGOVÁNÍ	12
VLASTNOSTI A SPECIFIKACE	12
PRO KOHO JE TECHNOLOGIE URČENA	13
DOSAŽITELNÉ VÝSLEDKY	14
DÉLKA POUŽITÍ A ČETNOST OPAKOVÁNÍ	15
KOMBINACE S JINÝMI TECHNIKAMI CVIČENÍ	15
POSTUP POUŽITÍ	16
DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ	17
ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA - HYGIENA PROVOZU	18
INFORMAČNÍ A SERVISNÍ PODPORA	18
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	19
CERTIFIKACE	19
EU DISTRIBUTOR	19
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	20

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtete tento návod k obsluze, seznamte se se všemi vyobrazeními a návod si uschovejte pro případné budoucí použití.
- Přístroj nepoužívejte, pokud trpíte závažným kožním onemocněním, otevřenými ranami nebo jinými zdravotními obtížemi v oblasti použití přístroje. V případě pochybností o vhodnosti použití doporučujeme konzultaci s lékařem.
- Při komerčním používání přístroje je provozovatel povinen zajistit dodržování hygienických požadavků dle platných právních předpisů a pravidelnou dezinfekci povrchů přicházejících do kontaktu s uživatelem. Doporučuje se používání vhodných hygienických ochranných pomůcek.
- Pokud je přístroj poškozen, vykazuje známky nesprávné funkce nebo přišel do kontaktu s vodou, nepoužívejte jej a obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce.
- V případě mechanického poškození přístroje se nedotýkejte jeho vnitřních částí. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Dojde-li k pádu přístroje nebo jeho nárazu, může dojít k poškození vnitřních komponentů. V takovém případě přístroj dále nepoužívejte, dokud nebude odborně zkontrolován.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí, například v koupelnách, sprchách, saunách nebo v blízkosti bazénů.
- Přístroj ani žádná jeho část nesmí být ponořena do vody ani vystavena přímému působení tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte během provozu bez dozoru. Po ukončení používání jej vždy řádně vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- Pokud byl přístroj přenesen z chladného prostředí do teplého, vyčkejte před jeho zapnutím alespoň 3 hodiny, aby nedošlo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř zařízení.
- Přístroj není určen dětem ani osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, otevřeného ohně nebo zařízení produkujících vysokou teplotu.
- Přístroj sami nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte. Veškeré opravy smí provádět pouze autorizovaný servis.
- Přístroj skladujte v suchém, čistém a dobře větraném prostředí chráněném před prachem, přímým slunečním zářením a nadměrnou vlhkostí.
- Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu a konektorů. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přístroj dále nepoužívejte.
- Přístroj používejte výhradně v souladu s účelem použití uvedeným v tomto návodu.
- Distributor ani výrobce neodpovídají za škody vzniklé nesprávným používáním přístroje, používáním v rozporu s tímto návodem, neodbornou manipulací nebo nedodržením bezpečnostních pokynů, pokud takové omezení odpovědnosti připouštějí platné právní předpisy.
- Tento přístroj není zdravotnickým prostředkem, pokud není výslovně uvedeno jinak. Přístroj není určen k diagnostice, léčbě, prevenci ani monitorování onemocnění.
- Informace uvedené v tomto návodu mají obecný informativní charakter a nenahrazují odborné lékařské vyšetření ani doporučení zdravotnického pracovníka.

KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax PulseMax Magnetic Studio Professional je přístroj určený k relaxačnímu a rekondičnímu působení na svalové struktury pomocí elektronické stimulace. Přístroj je určen pro neinvazivní použití a při správném používání nenarušuje povrch pokožky. Přístroj není zdravotnickým prostředkem ve smyslu platných právních předpisů a není určen k diagnostice, léčbě, prevenci ani monitorování jakéhokoli onemocnění. Veškeré informace o možných účincích přístroje mají pouze obecný informativní charakter a mohou se u jednotlivých uživatelů lišit. Přístroj je určen k použití v souladu s tímto návodem k obsluze za účelem relaxace, regenerace a rekondičního působení na vybrané svalové partie. Při komerčním používání přístroje se doporučuje, aby obsluhu prováděla osoba s odpovídající odbornou způsobilostí v oblasti masérských, rekondičních nebo obdobných služeb podle požadavků platných právních předpisů dané země.



Podmínky odborné způsobilosti a oprávnění k používání zařízení využívajících technologii přístroje se mohou v jednotlivých státech lišit. Provozovatel odpovídá za to, že používání přístroje probíhá v souladu s platnými právními předpisy, zejména předpisy upravujícími podnikání, ochranu veřejného zdraví, hygienické požadavky a bezpečnost provozu. Distributor/prodejce SANTADRIA s.r.o. nenese odpovědnost za používání přístroje v rozporu s tímto návodem, platnými právními předpisy nebo doporučeními výrobce. Odpovědnost za způsob používání přístroje v komerčním provozu nese vždy provozovatel zařízení. Při komerčním používání je provozovatel povinen zajistit hygienický provoz zařízení v souladu s platnými hygienickými předpisy, zejména pravidelnou dezinfekci povrchů přicházejících do kontaktu s uživatelem. Doporučuje se používání vhodných hygienických ochranných pomůcek nebo ochranných textilních bariér. Distributor ani výrobce neodpovídají za škody vzniklé neodborným používáním přístroje, nedodržením hygienických zásad, nesprávnou manipulací nebo používáním v rozporu s účelem použití uvedeným v tomto návodu, pokud takové omezení odpovědnosti připouštějí platné právní předpisy.

PRO KOHO NENÍ PŘÍSTROJ URČEN

Použití přístroje se nedoporučuje osobám, u nichž se vyskytuje některý z následujících stavů:

- Akutní virové onemocnění
- Anafylaxe
- Cévní poruchy nebo arteroskleróza
- Epilepsie, cukrovka nejzávažnějšího stavu, virové onemocnění
- Chronické kožní onemocnění v oblasti použití přístroje
- Je zakázáno používat přístroj v místě štítné žlázy
- Kardiostimulátor
- **Kovové implantáty v těle**
- Kožní infekce nebo otevřené kožní rány
- Krevní poruchy se srážlivostí
- Křečové žíly (varixy) ve velmi vážném stádiu
- Nedávný chirurgický zákrok (méně než 6 týdnů)
- Neurologická onemocnění
- Osoby pod vlivem alkoholu nebo návykový látek
- Osoby, které mají problémy se srážlivostí krve
- Osteoporóza
- Otoky a edémy velkých rozměrů
- Při stavu vysokých horeček
- Srdeční onemocnění, hypertenze
- Těhotenství
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Velmi tenká pokožka citlivá na dotyk
- Žilní trombóza



Poznámka:

Pokud si nejste jisti svým zdravotním stavem, doporučujeme konzultovat použití přístroje se svým praktickým lékařem. Ten zná podrobně váš zdravotní stav a může odborně vyhodnotit případná rizika použití přístroje. Výčet zdravotních omezení prosím neberte na lehkou váhu! Nebo alespoň využijte některý z našich kontaktů a ozvěte se nám. Můžeme případné otázky probrat společně.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážený zákazníku, ochrana vašeho zdraví a bezpečnosti je pro nás prioritou. Z tohoto důvodu uvádíme seznam stavů a situací, při kterých není používání přístroje doporučeno nebo může být nevhodné. Uvedené kontraindikace se vztahují zejména na osoby se závažnými nebo pokročilými zdravotními obtížemi. Pokud si nejste jisti vhodností použití přístroje s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav, doporučujeme konzultaci s lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Přístroj používejte vždy s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav, individuální citlivost a subjektivní komfort. Pokud během používání zaznamenáte jakékoli neobvyklé nebo nepříjemné reakce, například výrazné bušení srdce, nevolnost, motání hlavy, pocit slabosti, nadměrné pocení, dechové obtíže nebo nepřiměřeně intenzivní působení stimulace, přístroj okamžitě přestaňte používat. V případě přetrvávajících obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Přístroj je určen pro relaxační a rekondiční použití v souladu s tímto návodem k obsluze. Konstrukce přístroje je navržena s důrazem na komfort a bezpečnost uživatele při dodržování všech uvedených pokynů. Přístroj není zdravotnickým prostředkem a není určen k diagnostice, léčbě, prevenci ani monitorování onemocnění. Účinky používání mohou být individuální a mohou se u jednotlivých uživatelů lišit.

DŮLEŽITÉ RADY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Po každém použití ponechte přístroj v zapnutém stavu bez aktivní procedury po dobu přibližně 15 až 20 minut, aby mohlo dojít k dostatečnému ochlazení vnitřních komponentů. Teprve poté přístroj vypněte hlavním vypínačem.
- Doporučuje se, aby obsluhu přístroje prováděla druhá osoba, která je seznámena s jeho používáním a bezpečnostními pokyny.
- Během používání přístroje musí být vždy přítomna obsluha schopná v případě potřeby upravit nastavení nebo proceduru okamžitě přerušit.
- Pokud se během používání nebudete cítit komfortně nebo zaznamenáte neobvyklé reakce, například výrazné bušení srdce, dušnost, nevolnost, motání hlavy, nadměrné pocení, pocit slabosti nebo úzkosti, proceduru okamžitě ukončete. V případě přetrvávajících obtíží vyhledejte lékařskou pomoc.
- Doporučuje se vyhnout konzumaci těžkých nebo mastných jídel alespoň 1 až 2 hodiny před použitím přístroje.
- Během používání přístroje se doporučuje nekonzumovat jídlo ani nápoje. Po ukončení procedury doporučujeme krátký odpočinek před dalším fyzickým zatížením nebo konzumací těžších jídel.
- Před použitím i během používání přístroje se nedoporučuje konzumace alkoholu nebo jiných omamných a návykových látek.
- Před zahájením procedury odložte kovové předměty, například šperky, hodinky, opasky, mince, mobilní telefony nebo jiné kovové doplňky.
- Intenzitu stimulace nastavujte vždy postupně a s ohledem na individuální komfort uživatele. Při prvních procedurách doporučujeme používat nižší úroveň intenzity a nastavení postupně upravovat podle subjektivního vnímání uživatele. Použití přístroje nesmí způsobovat bolest ani výrazný diskomfort.
- Osoby s velmi citlivou pokožkou, zvýšenou tvorbou podlitin nebo zvýšenou citlivostí na teplo by měly používání přístroje konzultovat s lékařem nebo použití zvážit s ohledem na svůj zdravotní stav.
- Používání přístroje může u citlivých osob vyvolat přechodné změny srdeční frekvence nebo krevního tlaku. Osoby s diagnostikovaným kardiovaskulárním onemocněním nebo hypertenzí by měly použití přístroje předem konzultovat s lékařem.

- Osoby s poruchami srážlivosti krve nebo jinými závažnými zdravotními obtížemi by měly přístroj používat pouze po konzultaci s lékařem.
- Pokud se necítíte zdravotně v pořádku, jste unavení nebo trpíte akutním onemocněním, doporučuje se používání přístroje odložit.
- BeautyRelax PulseMax Magnetic Studio Professional není zdravotnickým prostředkem. Přístroj není určen k diagnostice, léčbě, prevenci ani monitorování onemocnění. Veškeré informace o možných účincích mají pouze obecný informativní charakter a mohou se u jednotlivých uživatelů lišit.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Přístroj BeautyRelax je možné používat pouze v oblasti hýždí. Je striktně zakázáno používat přístroj v oblasti srdce!

POPIS PŘÍSTROJE



1 Ovládací panel

2 Větrací otvor 3 Oblast výstupu energie

4 Světelný pásek


5 Univerzální kolečko

POPIS PŘÍSTROJE



- ① Vypínač napájení ② Zásuvka napájecího kabelu
③ Zásuvka ovládacího panelu ④ Chladicí ventilátor

POPIS DISPLEJE

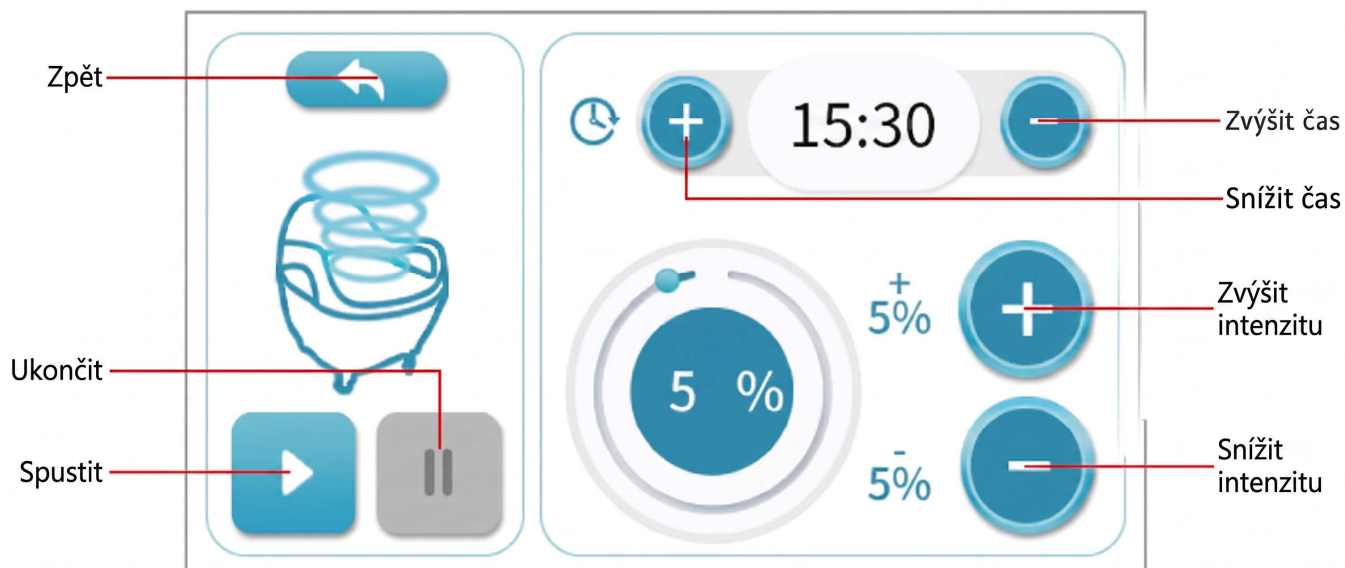

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Přístroj využívá technologii EMS stimulace určenou k relaxačnímu a rekondičnímu působení na svalové struktury. Intenzitu stimulace lze individuálně nastavit podle subjektivního komfortu uživatele. Přístroj je určen výhradně pro neinvazivní použití v souladu s tímto návodem k obsluze. BeautyRelax PulseMax Magnetic Studio Professional není zdravotnickým prostředkem a není určen k diagnostice, léčbě, prevenci ani monitorování jakéhokoli onemocnění. Účinky používání mohou být individuální a mohou se u jednotlivých uživatelů lišit.

VLASTNOSTI A SPECIFIKACE

Neinvazivní metoda

Přístroj je určen pro neinvazivní použití bez narušení povrchu pokožky. Nevyžaduje chirurgický zákrok ani rekonvalescenci.

Bezpečnost

Přístroj je navržen s důrazem na bezpečné používání při dodržování pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.

Cílené působení

Technologie stimulace je určena k působení na svalové struktury v oblasti pánevního dna.

Délka procedury

Doporučená délka jedné procedury je obvykle 20 až 30 minut.

Komfort použití

Uživatel může během procedury vnímat svalové kontrakce nebo jemné pulzování. Intenzitu stimulace lze nastavit individuálně podle subjektivního komfortu uživatele.

Příkon: až 2300 W

Délka pulzu: 300 μ s

Displej: dotykový, 4,3"

Rozměry: 87 × 74 × 74 cm

Hmotnost: 53 kg

Provedení: mobilní konstrukce na kolečkách

PRO KOHO JE TECHNOLOGIE URČENA

Přístroj je určen pro dospělé osoby, které vyhledávají relaxační a rekondiční působení na svalové struktury v oblasti pánevního dna v rámci péče o tělesnou kondici a zdravý životní styl. Přístroj může přispět ke zlepšení subjektivního komfortu a vnímání svalové aktivity v oblasti pánevního dna. Účinky používání jsou individuální a mohou se u jednotlivých uživatelů lišit.

Pro osoby usilující o zpevnění svalů

Přístroj je vhodný pro osoby, které chtějí podpořit aktivaci a posílení svalů pánevního dna jako součást pravidelné péče o fyzickou kondici a celkovou pohodu. Přístroj není zdravotnickým prostředkem a není určen k diagnostice, léčbě, prevenci ani monitorování onemocnění.

DOSAŽITELNÉ VÝSLEDKY

Pravidelné používání přístroje může u některých uživatelů přispět ke zlepšení subjektivního vnímání svalové aktivity, svalového tonusu a celkového komfortu v oblasti pánevního dna. Účinky používání jsou individuální a mohou se u jednotlivých osob lišit.

Přístroj je určen výhradně k relaxačnímu a rekondičnímu použití. Není zdravotnickým prostředkem a není určen k diagnostice, léčbě, prevenci ani monitorování jakýchkoli zdravotních obtíží.

Podpora svalové aktivity pánevního dna

Technologie stimulace může přispět k aktivaci a podpoře svalové činnosti v oblasti pánevního dna při pravidelném používání v souladu s tímto návodem.

Subjektivní komfort a celková pohoda

Někteří uživatelé mohou při pravidelném používání vnímat zlepšení celkového komfortu a tělesného vnímání v oblasti pánevního dna.

Individuální výsledky

Vnímání účinků a dosažené výsledky jsou individuální a závisí na řadě faktorů, například na zdravotním stavu, pravidelnosti používání a celkové fyzické kondici uživatele.

Přístroj nenahrazuje lékařskou péči, odbornou rehabilitaci ani individuální doporučení zdravotnického pracovníka.

DÉLKA POUŽITÍ A ČETNOST OPAKOVÁNÍ

Délka jednoho sezení

Doporučená délka jedné procedury je obvykle 20 až 30 minut v závislosti na individuálním nastavení a subjektivním komfortu uživatele.

Doporučená četnost

Doporučuje se používat přístroj 1 až 2krát týdně po dobu přibližně 5 až 8 týdnů. Následně lze pokračovat v udržovacím režimu podle individuálních potřeb uživatele, obvykle v rozsahu 1 až 2 procedur měsíčně.

Doporučená četnost používání má pouze orientační charakter. Reakce organismu mohou být individuální a mohou se u jednotlivých uživatelů lišit.

KOMBINACE S JINÝMI TECHNIKAMI CVIČENÍ

Technologii EMS stimulace lze kombinovat s běžnými pohybovými aktivitami a cvičebními metodami zaměřenými na oblast pánevního dna, například s cíleným cvičením, protahováním, jógou nebo fyzickou aktivitou podporující celkovou kondici. Přístroj může sloužit jako doplněk pravidelné péče o tělesnou kondici a zdravý životní styl. V případě zdravotních obtíží nebo individuálních omezení doporučujeme vhodnost kombinace s jinými metodami konzultovat s lékařem nebo kvalifikovaným odborníkem. Přístroj není zdravotnickým prostředkem a nenahrazuje odbornou lékařskou péči, rehabilitaci ani fyzioterapeutické postupy.

POSTUP POUŽITÍ

1. PŘÍPRAVA A ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

- **Kontrola kabelů:** Před spuštěním se ujistěte, že je ovládací panel pevně propojen se zásuvkou na zadní straně křesla a že je správně zapojen hlavní napájecí kabel.
- **Uvedení do provozu:** Zapněte síťový vypínač umístěný na zadní straně přístroje. Po zapnutí se aktivuje obrazovka ovládacího panelu.

2. VÝBĚR PROGRAMU A NASTAVENÍ PARAMETRŮ

- **Volba režimu:** Na úvodní obrazovce nejprve zvolte program podle pohlaví uživatele – k dispozici je režim pro muže a režim pro ženy. Poté potvrďte volbu a přejděte na nastavení samotné procedury.
- **Délka použití:** Doporučená doba jedné procedury je **20 až 30 minut**. Tuto hodnotu můžete na panelu ručně zvýšit či snížit dle potřeby.
- **Nastavení intenzity (energie):** S použitím vždy začínejte na **nejnižší úrovni energie**.
 - Intenzitu postupně upravujte v krocích po 5 % nahoru nebo dolů.
 - Výslednou energii vždy přizpůsobte individuální citlivosti tak, aby byla pro uživatele **pohodlně snesitelná**. Během působení je normální cítit mírné brnění.

3. PRŮBĚH A KONTROLA PROCEDURY

- **Spuštění:** Jakmile je uživatel pohodlně usazen v oblasti určené pro výstup energie (sedací část křesla), stiskněte tlačítko pro spuštění provozu.
- **Kontrola v průběhu:** Pokud je v průběhu použití potřeba aplikaci okamžitě přerušit, použijte tlačítko pro zastavení. Pokud se potřebujete vrátit v nastavení o krok zpět, použijte k tomu určenou navigační šipku.

4. REŽIM PO UKONČENÍ POUŽITÍ

- **Frekvence užívání:** Elektronická terapie pánevního dna by se **neměla provádět každý den**, důležitá je pravidelnost v rozumných intervalech.
- **Možné tělesné reakce:** Terapie stimuluje svaly, rozšiřuje cévy a výrazně podporuje krevní oběh. Z toho důvodu se po ukončení procedury může objevit krátkodobé lokální svědění, začervenání pokožky, případně mírná motání hlavy či bušení srdce. Tyto příznaky jsou běžné a po krátkém odpočinku samy odezní.

DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ

Prodávající firma **SANTADRIA s.r.o.**, IČO: 29195454, DIČ: CZ29195454, tímto informuje zákazníka, že výrobek je určen k **relaxačnímu a masážnímu použití** v souladu s návodem k obsluze a **není zdravotnickým prostředkem** ani neslouží k diagnostice, prevenci nebo léčbě jakéhokoli onemocnění.

Prodávající odpovídá za vlastnosti výrobku v rozsahu stanoveném **platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky**, zejména za shodu výrobku s technickými a bezpečnostními požadavky v okamžiku jeho uvedení na trh.

Prodávající **nenese odpovědnost za škody nebo újmy**, které vzniknou v důsledku:

- používání výrobku v rozporu s návodem k obsluze, bezpečnostními pokyny nebo určeným účelem použití,
- neodborného, nevhodného nebo nadměrného používání výrobku,
- používání výrobku osobami, u nichž je jeho použití podle návodu kontraindikováno,
- zásahů do výrobku, jeho úprav, oprav nebo manipulace provedených neoprávněnou osobou,
- používání výrobku v rozporu s platnými právními předpisy v zemi, kde je výrobek používán.

V případě **komerčního používání výrobku** bere zákazník na vědomí, že **odpovědnost za splnění veškerých požadavků vyplývajících z platné legislativy**, zejména v oblasti odborné způsobilosti obsluhy, licencí, povolení nebo jiných zákonných podmínek, **nese výhradně provozovatel** zařízení. Prodávající nenese odpovědnost za právní důsledky vyplývající z komerčního používání výrobku v rozporu s právními předpisy platnými v konkrétní jurisdikci.

Tato doložka **neomezuje ani nevylučuje práva zákazníka**, která mu náleží podle závazných právních předpisů o ochraně spotřebitele, ani odpovědnost prodávajícího za vady výrobku či škodu způsobenou vadným výrobkem v rozsahu, v jakém ji nelze podle práva vyloučit.

ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA - HYGIENA PROVOZU

Údržba přístroje je velmi důležitá zejména v případech, kdy je přístroj používán více osobami. Při údržbě přístroje věnujte pozornost v těchto bodech:

- Povrch přístroje udržujte v dobré kondici a čistý.
- K čištění nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky.
- Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje.
- Žádná část aplikační hlavice není vodotěsná. Není určena k ponoření do vody.

INFORMAČNÍ A SERVISNÍ PODPORA

V průběhu používání přístroje můžete narazit na situaci, kdy budete potřebovat poradit ohledně používání přístroje nebo technického problému. Neváhejte se na nás obrátit. Jsme vám plně k dispozici.



beautyrelax

 **PO - PÁ 11:00 - 18:00**
(420) 737 196 160

Facebook: facebook.com/BeautyRelaxEquipment/

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160



737 196 160

mh@santadria.cz

shop.beautyrelax.cz

www.beautyrelax.cz

facebook.com/BeautyRelaxEquipment



Martin Hrbek
odborný konzultant

prodej | servis | poradenství | konzultace | školení

SANTADRIA s.r.o. Mojmírovo nám. 75/2 Brno 61200 Brno 61200 IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní přístroj

BeautyRelax Pulsemax Magnetic Studio Professional

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-3121**

EAN: **8594166124202**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je **ve shodě** s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2021 EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN 55014-2:2021 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 + EN

A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021 60335-2-23:2003+A1:2008+A2:2015

62233:2008

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Přístroj není zdravotnický prostředek.

**Slouží pro sportovní rekondiční masáž za účelem uvolnění svalů
na vybraných částech těla.**

Přístroj spadá do kategorie masážních přístrojů - TARIC 90191010

Při komerčním použití je třeba klást důraz na hygienu provozu přístroje. Při komerčním použití je třeba dbát na hygienu provozu.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno

Dne: 1.1.2026