

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj **BeautyRelax BR-3177**

AIRFLOW ULTIMATE



OBSAH:

VĚNUJTE POZORNOST	4
UPOZORNĚNÍ	5
PRO KOHO NENÍ PŘÍSTROJ URČEN	6
DŮLEŽITÉ RADY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ	7
BENEFITY MASÁŽE PRO VAŠE TĚLO	8
HLAVNÍ VÝHODY	10
TECHNICKÉ PARAMETRY	10
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	11
OBSAH BALENÍ	12
POPIS PŘÍSTROJE	20
POPIS DISPLEJE	21
AUTOMATICKÉ MASÁŽNÍ PROGRAMY	22
APLIKACE NÁVLEKŮ	24
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	25
DOPORUČENÉ TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ	26
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	27
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	29
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	30
CERTIFIKACE	30
EU DISTRIBUTOR	30
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	31

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

VĚNUJTE POZORNOST

Přístroj BeautyRelax AIRFLOW ULTIMATE je určen k provádění kompresní masáže dolních končetin. Při provozu může vyvíjet vyšší úroveň mechanického tlaku na ošetřované oblasti. Kompresní masáž představuje zvýšenou fyzickou zátěž organismu, zejména v oblasti krevního oběhu. Mechanické stlačování dolních končetin může ovlivnit cirkulaci krve a zatěžovat cévní systém. Pokud si nejste jisti, zda váš aktuální zdravotní stav umožňuje bezpečné používání přístroje, doporučuje se před prvním použitím konzultace s praktickým lékařem. Zároveň věnujte zvýšenou pozornost seznamu kontraindikací uvedených v tomto návodu k obsluze a vždy dodržujte stanovené pokyny pro bezpečné používání přístroje.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Seznamte se se všemi funkcemi přístroje a návod si uschovejte pro případné pozdější použití.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není přístroj, napájecí adaptér, vzduchové hadice nebo návleky viditelně poškozené.
- Pokud přístroj nefunguje správně, byl mechanicky poškozen nebo přišel do kontaktu s vodou, nepoužívejte jej a obraťte se na autorizovaný servis.
- Nepokoušejte se přístroj rozebírat ani opravovat svépomocí. Veškeré opravy smí provádět pouze autorizovaný servis.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody ani ve vlhkém prostředí, například v koupelně, sprše nebo u bazénu.
- Přístroj, ovladač ani napájecí adaptér nejsou vodotěsné. Nikdy je neponořujte do vody ani je neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Přístroj používejte pouze s dodaným napájecím adaptérem.
- Přístroj nenechávejte během provozu bez dozoru. Po skončení masáže jej vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- Pokud byl přístroj přenesen z chladného prostředí do teplé místnosti, doporučujeme před použitím vyčkat přibližně 2 až 3 hodiny, aby se vyrovnala teplota a případná zkondenzovaná vlhkost se odpařila.
- Přístroj není určen k používání dětmi. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi by jej měly používat pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo otevřený oheň, a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Vzduchové hadice ani napájecí kabel během používání nepřehýbejte, nemačkejte ani nevystavujte nadměrnému tahu.
- Přístroj skladujte na suchém, čistém místě chráněném před prachem, vlhkostí a přímým slunečním zářením.
- Pokud máte zdravotní obtíže nebo si nejste jisti, zda je pro vás kompresní masáž vhodná, doporučujeme se před prvním použitím poradit s lékařem. Věnujte pozornost také seznamu kontraindikací uvedenému v tomto návodu.
- Přístroj je určen především pro osobní použití. Pokud jej používá více osob, doporučujeme z hygienických důvodů používat návleky přes tenkou vrstvu oblečení a pravidelně je čistit podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Přístroj používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu a pouze k účelu, pro který je určen.
- Výrobce ani distributor neodpovídají za škody vzniklé používáním přístroje v rozporu s tímto návodem nebo jeho nevhodným používáním.

PRO KOHO NENÍ PŘÍSTROJ URČEN

Přístroj není doporučeno používat pro osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:



1. Celkové zdravotní stavy (preventivní omezení)

- akutní horečnaté stavy nebo celková fyzická indispozice
- akutní virové nebo bakteriální onemocnění
- výrazná únava, vyčerpání nebo oslabení organismu
- stav po nedávném chirurgickém zákroku (méně než 6 týdnů)
- těhotenství

2. Kardiovaskulární a cévní omezení

- závažné srdeční obtíže
- neléčený nebo nestabilní vysoký krevní tlak
- poruchy krevního oběhu v pokročilém stádiu
- stavy spojené se zvýšeným rizikem vzniku krevních sraženin
- žilní onemocnění v pokročilém stádiu (např. výrazné varixy)

3. Neurologické a metabolické stavy

- epilepsie
- závažné poruchy srážlivosti krve
- diabetes v pokročilém nebo nestabilním stavu

4. Kožní a lokální omezení (v místě aplikace)

- akutní zánětlivá nebo infekční kožní onemocnění
- otevřené rány, oděrky, popáleniny nebo čerstvé jizvy
- velmi citlivá, tenká nebo bolestivá pokožka se sklonem k tvorbě modřin
- kožní projevy nejasného původu

5. Implantáty a cizí tělesa

- přítomnost kardiostimulátoru
- kovové implantáty v oblasti aplikace, pokud by mechanický tlak vyvolával bolest nebo nepříjemné pocity

6. Další omezení použití

- osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných a návykových látek
- osoby se sníženou schopností vnímat bolest nebo nepohodlí
- osoby neschopné aktivní komunikace o svém aktuálním stavu během masáže

Důležité upozornění

Pokud si uživatel **není jistý svým aktuálním zdravotním stavem**, doporučuje se **konzultovat vhodnost použití přístroje s lékařem**. Použití přístroje je vždy **dobrovolné** a probíhá na **vlastní odpovědnost uživatele** při dodržení tohoto návodu.

DŮLEŽITÉ RADY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Pokud se během používání přístroje necítíte komfortně, zaznamenáte výrazné zrychlení dýchání, nepříjemné pocity nebo stavy úzkosti, přístroj ihned vypněte stisknutím tlačítka POWER a uvolněte nohy z masážních návleků rozepnutím suchých zipů.
- První použití vždy zahajujte na nejnižší úrovni kompresní masáže.
- Při nasazování masážních návleků na dolní končetiny neutahujte zapínání pomocí suchého zipu nadměrnou silou. Je nutné počítat s tím, že po spuštění přístroje dochází k mechanickému stlačování končetin.
- Pokud je tlak na končetiny nepříjemný nebo bolestivý i při nejnižší úrovni kompresní masáže, návleky ihned uvolněte a přístroj vypněte.
- Zvažte používání přístroje v případě, že máte velmi citlivou nebo tenkou pokožku se sklony ke vzniku modřin či pohmožděnin i při mírném mechanickém tlaku.
- V případě, že trpíte vysokým krevním tlakem nebo jiným onemocněním kardiovaskulárního systému, doporučuje se konzultovat používání přístroje s lékařem před jeho prvním použitím.
- Pokud máte poruchy srážlivosti krve, prodělali jste trombózu nebo jiné cévní onemocnění, konzultujte vhodnost používání přístroje s lékařem.
- Během používání přístroje mějte ovladač vždy v dosahu, abyste mohli přístroj v případě potřeby okamžitě vypnout.
- Doporučená maximální délka jednoho použití nepřesahuje 10–20 minut denně.
- Frekvenci používání přizpůsobte zvolené intenzitě masáže, svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a míře fyzické aktivity.
- Masážní návleky nepoužívejte ve stoje ani vsedě. Přístroj používejte výhradně v leže v horizontální poloze, například na posteli nebo pohovce.
- BeautyRelax AIRFLOW ULTIMATE není zdravotnický prostředek. Není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci onemocnění. Jedná se o masážní přístroj určený k domácímu použití v souladu s tímto návodem k obsluze.

BENEFITY MASÁŽE PRO VAŠE TĚLO


Uvolnění svalového napětí a pocit relaxace

Masáž je oblíbená mezi osobami s aktivním i sedavým životním stylem, stejně jako u lidí, kteří při práci dlouhodobě stojí. Po zvýšené fyzické zátěži nebo dlouhém dni mohou svaly působit zatuhle a unaveně. Masáž pomocí rotačního válce může přispět k uvolnění svalového napětí a k celkovému pocitu fyzické úlevy. Pravidelné používání umožňuje dopřát svalům relaxaci i v pohodlí domova.




Lokální podpora prokrvení pokožky

Masáž rotačním válcem je spojována s dočasnou stimulací lokálního krevního oběhu v místě aplikace. Tento efekt je vnímán zejména v oblasti dolních končetin, kde může přispět k pocitu lehkosti a tepla. Vnímání účinku je individuální a závisí na celkovém zdravotním stavu uživatele. Přístroj není určen jako zdravotnický prostředek a jeho používání nenahrazuje lékařskou péči.

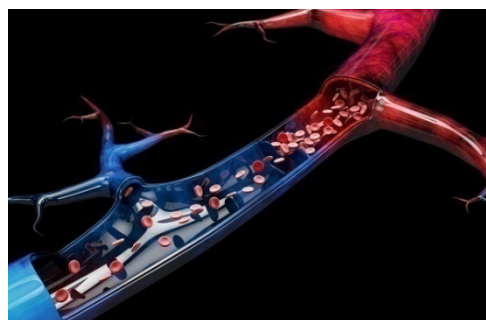

Podpora přirozených procesů

Lymfatický systém se podílí na odvádění přebytečné tekutiny z tkání. Mechanická masáž dolních končetin může podpořit přirozené procesy spojené s tokem lymfy a přispět k subjektivnímu pocitu lehčích nohou a uvolnění. Účinek je individuální a může se u jednotlivých osob lišit.

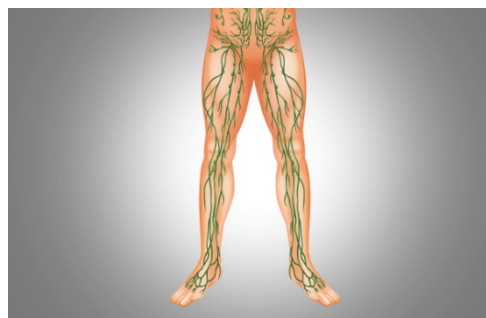

Pocit regenerace po fyzické zátěži

Po intenzivní fyzické aktivitě se mohou objevit pocity únavy, ztuhlosti nebo nepohodlí ve svazech. Masáž je často využívána jako součást relaxační a regenerační rutiny, která může přispět k celkovému komfortu svalů po zátěži. Nejedná se o léčbu ani náhradu odborné péče.



Uvolnění oblasti pat a chodidel

Chodidla jsou při dlouhém stání, chůzi nebo turistice výrazně zatěžována. Masáž rotačním válcem lze aplikovat nejen na stehna a lýtky, ale také na oblast chodidel. Jemná mechanická stimulace může přispět k pocitu uvolnění a relaxace této namáhané části těla.



Závěrečné upozornění

Masáž je relaxační a kosmetická metoda. Účinky jsou individuální a mohou se u jednotlivých uživatelů lišit. Přístroj není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci onemocnění. V případě zdravotních obtíží nebo pochybností doporučujeme konzultaci s lékařem.

HLAVNÍ VÝHODY

- Komplexní vzduchová kompresní masáž od chodidel až po stehna
- Masáž chodidel, kotníků, lýtek, kolen i stehen
- Postupná tlaková masáž ve směru od chodidel vzhůru
- Pomáhá uvolnit unavené a namáhané svaly
- Přispívá k pocitu lehkých a odpočatých nohou
- Vhodný po sportovní aktivitě i dlouhém dni
- Ideální při dlouhém stání nebo sedavém zaměstnání
- 3 automatické masážní programy
- 3 nastavitelné úrovně intenzity komprese
- Vyhřívání kolen ve 3 stupních teploty
- Přehledný ovladač s displejem
- Jednoduché a intuitivní ovládání
- Rovnoměrná komprese pomocí více vzduchových komor
- Nastavitelná velikost díky prodlužovacím páskům
- Komfortní upevnění pomocí pevných suchých zipů
- Automatické vypnutí po ukončení programu
- Vhodný pro pravidelnou domácí regeneraci
- Moderní černo-šedé provedení
- Kompaktní konstrukce pro snadné skladování
- Profesionální pocit kompresní masáže v pohodlí domova

TECHNICKÉ PARAMETRY

- EAN: 8594166119826
- Technologie: Vzduchová kompresní masáž
- Masážní programy: 3 (Pressing, Kneading, Shiatsu)
- Úrovně intenzity masáže: 3
- Vyhřívání kolen: Ano
- Úrovně vyhřívání: 3 (35 °C / 45 °C / 55 °C)
- Automatické vypnutí: Po 20 minutách
- Ovládání: Dálkový ovladač s LCD displejem
- Napájení: Síťový adaptér 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Příkon: 24 W
- Materiál: PVC
- Barva: Černá
- Maximální obvod stehen: 76 cm
- Maximální obvod lýtek: 56 cm
- Maximální obvod chodidel: 36 cm
- Rozšiřující pásy: 4 ks (součást balení)
- Transportní taška: Ano
- Certifikace: CE
- Hmotnost přístroje: 4 kg
- Rozměry balení: 43 × 24 × 18 cm
- Určení: Domácí použití

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Airflow Ultimate je moderní masážní přístroj určený pro domácí regeneraci unavených nohou. Využívá vzduchovou kompresní masáž, při které se jednotlivé vzduchové komory postupně nafukují a vyfukují. Rytmický tlak pomáhá uvolnit svalové napětí, podporuje přirozenou cirkulaci krve a přispívá k pocitu lehkých nohou po sportu, dlouhém stání i sedavém zaměstnání. Ergonomické návleky masírují chodidla, kotníky i lýtka a díky nastavitelným suchým zipům se přizpůsobí různým velikostem. Pro ještě vyšší komfort je přístroj vybaven třemi úrovněmi vyhřívání a přehledným kabelovým ovladačem, kterým snadno nastavíte intenzitu masáže i ohřev. Automatický 20minutový časovač zajistí pohodlné a bezpečné používání bez nutnosti hlídat délku procedury. Ideální volba pro každodenní relaxaci a regeneraci v pohodlí domova.

VYHŘÍVANÝ MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ NA KOLENA A NOHY

**ÚLEVA & REGENERACE**

3 ÚROVNĚ TEPLoty – ÚLEVA, KDYKOLI JI POTŘEBUJETE

**3 ÚROVNĚ TEPLoty**
45°C / 50°C / 55°C
přizpůsobte si teplo přesně podle sebe

**VZDUCHOVÁ MASÁŽ**
uvolňuje svaly, zlepšuje krevní oběh a přináší okamžitou úlevu

**AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ**
bezpečné používání bez starostí

2 V 1 – TEPLo + MASÁŽ
Komplexní péče pro vaše kolena a nohy.
Uvolnění napětí, bolesti i únavy.



**POCÍTE ROZDÍL**
JIŽ PO PRVNÍM POUŽITÍ

**BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ**

**LEHKÉ A POHODLNÉ NA NOŠENÍ**

**SKVĚLÝ DÁREK PRO VAŠE BLÍZKÉ**

**DLOUHÝ KABEL PRO MAXIMÁLNÍ POHODLÍ**

11

KOLENA A CHODIDLA

3-STUPŇOVÁ KONSTANTNÍ TEPLOTA

HORKÁ KOMPRES

Duální ohřev pro kolena a chodidla
jedna masáž, dvojí úleva

1 ÚROVEŇ 1
45 °C

2 ÚROVEŇ 2
50 °C

3 ÚROVEŇ 3
55 °C

BEZPEČNĚ A SPOLEHLIVĚ
Rovnoměrné teplo
pro maximální komfort



HLUBOKÉ PROHŘÁTÍ
Podporuje prokrvení
a uvolnění svalů



ÚLEVA OD BOLESTI
Pomáhá zmírnit napětí,
ztuhlost a bolest



POHODLNĚ A SNADNĚ
Nastavitelný design,
snadné použití



DLOUHÁ VÝDRŽ
Dobíjecí baterie
pro použití kdykoli





ZAHŘÍVÁNÍ
ÚLEVA, KTEROU
UCÍTÍTE

OBSAH BALENÍ

- Dálkové ovládání
- Návleky na dolní končetiny
- Návod k obsluze
- Napájecí síťový adaptér 220V
- Praktická taška

NOVINKA

ÚLEVA &
REGENERACE

MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ NA KOLENA A NOHY

3 ÚROVNĚ TEPLA • MASÁŽ • ÚLEVA

PRO VAŠE KLOUBY, CÍRKULACI A POHODLÍ



3 ÚROVNĚ TEPLA

45°C / 50°C / 55°C



VIBRAČNÍ MASÁŽ

uvolňuje svaly, zlepšuje
krevní oběh a přináší
okamžitou úlevuAUTOMATICKÉ
VYPNUTÍbezpečné používání
bez starostíMASÁŽ HÝŽDÍ
A STEHENuvolňuje napětí
ve svazechINTELIGENTNÍ
OVLÁDÁNÍsnadné použití,
přehledný displejMASÁŽ CHODIDEL
A LÝTEKpodporuje oběh krve
a regeneraciVYHŘÍVANÁ
KOLENNÍ ORTÉZAcílené teplo pro
maximální úlevu

MASÁŽ LÝTEK

doplňková masáž
pro uvolnění
a regeneraci

2 V 1 – TEPLO + MASÁŽ

Komplexní péče pro vaše kolena a nohy.
Uvolnění napětí, bolesti i únavy.PEČUJTE
O SVÉ TĚLO
KAŽDÝ DENBEZPEČNÉ
A SPOLEHLIVÉLEHKÉ A POHODLNÉ
NA NOŠENÍSKVĚLÝ DÁREK
PRO VAŠE BLÍZKÉDLOUHÝ KABEL
PRO MAXIMÁLNÍ
POHODLÍ

OVLADAČ

VŠE POD KONTROLOU

Jednoduché ovládání, maximální efekt



3 ÚROVNĚ INTENZITY

Snadno si nastavíte intenzitu podle svých potřeb.



3 REŽIMY

Sekvenční, cirkulační nebo kombinovaný režim.



DISPLEJ V REÁLNÉM ČASE

Přehledně zobrazuje nastavení, úroveň tepla a zbývající čas.



ČASOVAČ

Zobrazuje zbývající čas masáže.



3 ÚROVNĚ VYHŘÍVÁNÍ

Nastavte si teplo přesně tak, jak vám vyhovuje.



ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Jednoduché ovládání jedním tlačítkem.



INTENZITA

Rychlé nastavení síly masáže.



REŽIM

Snadná změna režimu masáže.



JEDNODUCHÉ

Intuitivní ovládání pro každého.



PŘEHLEDNÉ

Všechny informace na první pohled.



ÚČINNÉ


Příspěvek terapii svým potřebám.

REVOLUČNÍ 3KANÁLOVÁ VZDUCHOVÁ MASÁŽ

3KANÁLOVÁ VZDUCHOVÁ MASÁŽ

PUMPA 4,5 L S CHYTRÝM OVLÁDÁNÍM

PŘED

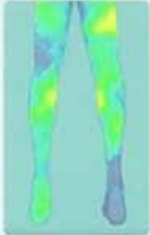

PO



>

-  **ZLEPŠUJE KREVŇÍ OBĚH**
podporuje lepší průtok krve
-  **ZMÍRŇUJE ÚNAVU A NAPĚTÍ**
přináší úlevu a relaxaci
-  **CÍLENÁ 3KANÁLOVÁ MASÁŽ**
chodidlo – lýtko – stehno

3 STEHENNÍ VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ

2 LÝTKOVÝ VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ

1 CHODIDLOVÝ VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ



 **BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ**

 **3 REŽIMY INTENZITY**

 **TICHÝ PROVOZ POUZE 40 dB**

 **VÝDRŽ AŽ 2 HODINY**

NOVINKA

CELKOVÁ MASÁŽ NOHOU

4v1 VZDUCHOVÝ MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ

Kompletní péče | Prokrvení | Úleva | Pohoda



VZDUCHOVÁ KOMPRESIE

Uvolňuje svaly a zlepšuje
cirkulaci krve

HŘEJIVÁ TERAPIE

Příjemné teplo podporuje
regeneraci a uvolnění

3 REŽIMY INTENZITY

Přizpůsobte si masáž
přesně podle svých potřeb

NASTAVITELNÁ VELIKOST

Vhodné pro všechny –
jednoduše přizpůsobitelné

**JEDNA VELIKOST
PRO VŠECHNY**
Nastavitelné a pohodlné



14"
zakrývá
chodidla



18"
zakrývá
lýtka



27"
zakrývá
stehna

IDEÁLNÍ PRO KAŽDÉHO



RELAXACE

Uvolnění po náročném dni



SPORT

Podpora regenerace svalů



PRÁCE

Pohodlí při dlouhém sezení



RYCHLEJŠÍ REGENERACE

Po sportu i náročném dni



MÉNĚ BOLESTI A OTEKLIN

Přináší úlevu
unaveným nohám

RELAXACE A POHODA

Každodenní chvilka
jen pro vás

BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ

Snadné a pohodlné
používání

BEZPEČNÉ POUŽITÍ



KVALITNÍ MATERIÁL



SKVĚLÝ DÁREK

NASTAVITELNÁ VELIKOST

Ideální pro každého.



PŘÍZPŮSOBITELNÉ

Nastavte velikost pro perfektní pohodlí



UNIVERZÁLNÍ

Vhodné pro ženy i muže, mladé i starší



LEHKÉ A POHODLNÉ

Navrženo pro každodenní použití doma, v práci i při sportu



27 cm

nositelná velikost

18 cm

nositelná velikost

14 cm

nositelná velikost

PRO KAŽDODENNÍ ŽIVOT



RELAXACE

Uvolnění a regenerace po náročném dni



SPORT

Podpora výkonu a rychlejší obnova



PRÁCE

Pohodlí a komfort během celého dne



BEZPEČNÉ
A ÚČINNÉ



DLOUHÁ
VÝDRŽ



SNADNÉ
POUŽITÍ



KVALITNÍ
MATERIÁLY

CHYTRÁ KOMPRESNÍ MASÁŽNÍ TERAPIE

**ÚLEVA, KTEROU UCÍTÍTE
KAŽDÝ DEN**



MÉNĚ OTOKŮ

Podporuje
odtok lymfy
a snižuje otoky



ÚLEVA OD BOLESTI

Pomáhá zmírnit
napětí a únavu
svalů



RYCHLEJŠÍ REGENERACE

Ideální po sportu
i dlouhém dni



**3 REŽIMY
PRO VAŠI
MAXIMÁLNÍ
POHODU**

SEKVENČNÍ REŽIM

Postupné stlačování
od chodidel směrem
ke stehnům.



Podporuje krevní oběh
a snižuje únavu.

CIRKULAČNÍ REŽIM

Stlačování všech komor
současně.



Zlepšuje proudění krve
a lymfatického systému.

KOMBINOVANÝ REŽIM

Kombinace sekvenčního
a cirkulačního režimu.



Komplexní péče
pro maximální efekt.

NOVINKA



ÚLEVA & REGENERACE

AIR-PRO KOMPRESNÍ MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ

PRO LEHKÉ, ULEVĚNÉ A ZDRAVÉ NOHY

**KOMPRESNÍ MASÁŽ**
Podporuje krevní oběh
a zmírňuje otoky

**3 ÚROVNĚ INTENZITY**
Přizpůsobte si masáž
svým potřebám

**PŘEHLEDNÝ LCD DISPLEJ**
Snadné ovládání
a jasné zobrazení

4 KLÍČOVÉ VÝHODY

**Lehké nohy
každý den**

**Rychlejší
regenerace**

**Lepší krevní
oběh**

**Úleva od
únavy a napětí**

**BEZPEČNÉ
A POHODLNÉ**
AUTOMATICKÉ
VYPNUTÍ

IDEÁLNÍ PRO:

**Sportovce**

**Pracující
ve stoje**

**Cestovatele**

**Každého, kdo chce
lehké nohy**

**3 ÚROVNĚ
INTENZITY**

**VZDUCHOVÁ
KOMPRESNÍ MASÁŽ**

**SNADNÉ
OVLÁDÁNÍ**

**INVESTICE DO VAŠEHO ZDRAVÍ A POHODY**

POPIS PŘÍSTROJE



1 NÁVLEKY NA NOHY

Ergonomicky tvarované masážní návleky obejmou lýtka i chodidla. Pomocí vzduchové komprese poskytují příjemnou masáž a podporují regeneraci.



2 VZDUCHOVÉ HADICE

Spojují návleky s řídicí jednotkou. Zajišťují plynulý přenos vzduchu, který vytváří kompresní masáž.



3 LCD DISPLEJ

Přehledný displej zobrazuje aktuální režim, intenzitu masáže, a čas.

Umožňuje snadné ovládání a kontrolu všech funkcí.



4 OVLÁDACÍ PANEL

Tlačítka pro zapnutí/vypnutí, nastavení režimu, intenzity a času masáže.

Jednoduché a intuitivní ovládání pro maximální komfort.



POPIS DISPLEJE



NAPÁJENÍ

Krátkým stiskem přístroj zapnete,
krátkým stiskem přístroj vypnete.



REŽIM

Na výběr jsou 3 režimy:

**SEKVENČNÍ • CÍRKULAČNÍ •
KOMBINOVANÝ**

Stisknutím tlačítka **M** přepínáte
mezi režimy.



VYHŘÍVÁNÍ

Na výběr jsou 3 úrovně vyhřívání.
Vyhřívání je umístěno v oblasti
kolen a chodidel.



NÍZKÁ



STŘEDNÍ



VYSOKÁ



INTENZITA

Na výběr jsou 3 úrovně intenzity.

Stisknutím tlačítka nastavíte
úroveň intenzity podle svých potřeb.




NÍZKÁ



STŘEDNÍ



VYSOKÁ

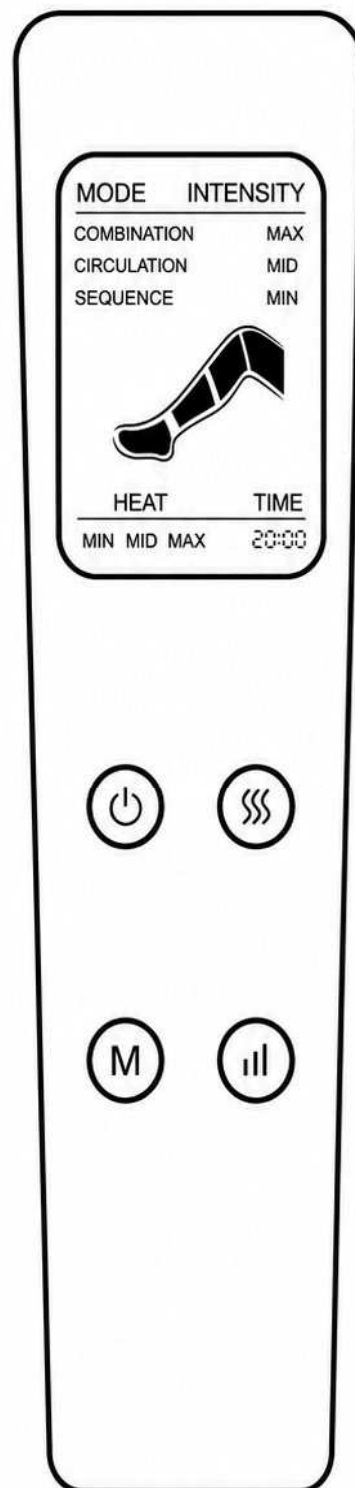

AUTOMATICKÉ MASÁŽNÍ PROGRAMY

1. SEQUENCE (SEKVENČNÍ MASÁŽ)

Nejčastější režim pro lymfatickou stimulaci.

- Komory se nafukují **postupně od chodidla směrem ke koleni**.
- Každá další komora navazuje na předchozí.
- Vytváří efekt „vlny“, která podporuje návrat žilní krve a lymfy.

Vhodné pro:

- unavené nohy,
- otoky,
- dlouhé stání nebo sezení,
- regeneraci po sportu.

2. CIRCULATION (CIRKULAČNÍ MASÁŽ)

Program zaměřený na prokrvení.

Typicky:

- jednotlivé komory se střídavě nafukují a vyfukují,
- tlak se přesouvá mezi různými částmi lýtky a chodidla,
- masáž působí dynamičtěji.

Vhodné pro:

- podporu krevního oběhu,
- zahřátí svalů,
- každodenní relaxaci.

3. COMBINATION (KOMBINOVANÝ PROGRAM)

Kombinuje oba předchozí režimy.

Obvykle:

- část programu využívá sekvenční kompresi,
- následně přechází do cirkulačního režimu,
- nabízí nejkomplexnější masáž.

Vhodné pro:

- celkovou regeneraci,
- intenzivnější masáž,
- běžné každodenní používání.

Situace	Doporučený program
Oteklé nohy	SEQUENCE
Pocit těžkých nohou	SEQUENCE
Podpora krevního oběhu	CIRCULATION
Regenerace po sportu	COMBINATION
Večerní relaxace	COMBINATION
Každodenní používání	COMBINATION

Další nastavení přístroje

Podle manuálu lze navíc nastavit:

- **3 úrovně intenzity: MIN / MID / MAX**
- **3 úrovně vyhřívání: přibližně 45 °C, 50 °C a 55 °C, přičemž vyhřívání je umístěno v oblasti kolene a chodidla.**

APLIKACE NÁVLEKŮ

1. Vyberte vhodné místo pro používání přístroje. Zohledněte délku napájecího kabelu adaptéru a zajistěte, aby během používání nemohlo dojít k napnutí nebo vytržení kabelu z ovladače.
2. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.
3. Zkontrolujte správné připojení obou vzduchových návleků k ovladači. Každý návlek je pevně připojen vzduchovou hadicí označenou **L (levá)** nebo **R (pravá)**. Ověřte, že je levý návlek připojen do konektoru **L** a pravý návlek do konektoru **R**.
4. Na každém návleku je vyznačeno označení **L** nebo **R**. Návlek **L** nasadte na levou nohu a návlek **R** na pravou nohu (z pohledu uživatele).
5. Návleky upevněte kolem chodidla, lýtky a kolene pomocí širokých pásek se suchým zipem. Zapínání utáhněte tak, aby návleky dobře přiléhaly, ale neomezovaly krevní oběh ani nezpůsobovaly nepříjemný tlak.
6. Pokud potřebujete zvětšit obvod návleků, použijte přiložené **rozšiřující díly se suchým zipem**. Ty jsou určeny pro uživatele s větším obvodem lýtek nebo stehen a umožňují pohodlnější nasazení.
7. Vzduchové hadice ved'te volně směrem od návleků k ovladači. Dbejte na to, aby nebyly překroucené, zalomené ani vystavené nadměrnému tahu, který by mohl omezit proudění vzduchu nebo poškodit hadice.
8. Po správném nasazení návleků stiskněte tlačítko **Power** na ovladači. Následně zvolte požadovaný **masážní program, úroveň intenzity** a případně také **vyhřívání** podle vlastních preferencí. Přístroj nabízí tři masážní režimy (Sequence, Circulation a Combination), tři úrovně intenzity (MIN, MID, MAX) a tři stupně vyhřívání.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Zapnutí přístroje

Krátce stiskněte tlačítko **POWER**. Po zapnutí se rozsvítí displej ovladače a přístroj je připraven k použití.

2. Volba masážního programu

Opakovaným stiskem tlačítka **MODE** můžete vybírat mezi třemi masážními programy:

3. SEQUENCE – sekvenční kompresní masáž,

4. CIRCULATION – cirkulační masáž podporující prokrvení,

5. COMBINATION – kombinace obou předchozích režimů.

Aktuálně zvolený program je zobrazen na displeji ovladače.

6. Nastavení vyhřívání

Stisknutím tlačítka **HEAT** aktivujete funkci vyhřívání. Opakovaným stiskem lze přepínat mezi **3 úrovněmi intenzity tepla**. Vyhřívání působí v oblasti **kolen a chodidel**.

7. Nastavení intenzity masáže

Tlačítkem **INTENSITY** nastavte požadovanou sílu vzduchové komprese.

Přístroj nabízí **3 úrovně intenzity**:

8. MIN – jemná masáž,

9. MID – střední intenzita,

10. MAX – nejvyšší intenzita.

11. Automatické vypnutí

Z bezpečnostních důvodů se přístroj automaticky vypne po **20 minutách** nepřetržitého provozu.

12. Vypnutí přístroje

Přístroj kdykoliv vypnete **dlouhým stisknutím tlačítka POWER**.

DOPORUČENÉ TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ

Masážní návleky nedoporučujeme používat na holou pokožku. Použijte ideálně v kombinaci s tenkými legínami.



Při používání přístroje si udělejte pohodlí. Snažte se ležet tak, aby se celé vaše tělo nacházelo ideálně v horizontální poloze. Využijte pohovku nebo postel.



NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak poznám, že je pro mě používání přístroje vhodné?

Před prvním použitím si přečtěte část **Kontraindikace** v tomto návodu. Pokud máte zdravotní obtíže, dlouhodobě užíváte léky nebo si nejste jisti, zda je pro vás kompresní masáž vhodná, doporučujeme poradit se se svým ošetřujícím lékařem.

Jak přístroj správně používat v domácím prostředí?

Pro co nejpohodlnější používání doporučujeme zvolit klidné místo, kde můžete nerušeně odpočívat. Ideální je používat přístroj vleže na posteli nebo pohovce, případně vsedě v pohodlném křesle s nohama v uvolněné poloze.

Jak pevně mám masážní návleky utáhnout?

Návleky by měly pohodlně přiléhat k nohám, ale neměly by nepříjemně škrtit. Po spuštění se jednotlivé komory nafukují, proto není potřeba návleky utahovat příliš pevně. Správné utažení si většina uživatelů najde již po několika použitích.

Jak dlouho a jak často přístroj používat?

Jeden masážní cyklus si dopřejte přibližně v délce **20-30 minut**. To je pro většinu uživatelů dostačující délka jedné masáže. Frekvenci používání si přizpůsobte svým potřebám a tomu, jak vám masáž vyhovuje.

Je potřeba dodržovat nějaký jídelníček?

Žádný zvláštní stravovací režim není nutný. Pro větší pohodlí však doporučujeme nepoužívat přístroj bezprostředně po vydatném jídle.

Jaké oblečení je při používání vhodné?

Nejlépe se osvědčuje lehké a pohodlné oblečení z tenkého materiálu, například legíny, sportovní kalhoty nebo tenké tepláky. Používání návleků přes tenkou vrstvu oblečení bývá pohodlnější a usnadňuje jejich údržbu.

Je masáž bolestivá?

Masáž by měla být příjemná a komfortní. Pokud je pro vás tlak příliš silný, zvolte nižší intenzitu nebo přístroj vypněte. Každý člověk vnímá intenzitu masáže trochu jinak, proto si nastavení přizpůsobte podle vlastních pocitů.

Mohu přístroj použít i na jiné části těla?

Přístroj je navržen pro kompresní masáž dolních končetin. Doporučujeme jej používat pouze způsobem popsáním v tomto návodu.

Co dělat, když mi během masáže není příjemně?

Mějte ovladač vždy na dosah ruky. Pokud vám masáž přestane být příjemná nebo budete chtít masáž ukončit, přístroj vypněte a návleky jednoduše rozepte pomocí suchých zipů.

Co mohu od přístroje očekávat?

Přístroj poskytuje vzduchovou kompresní masáž nohou s možností nastavení intenzity i vyhřívání. Je určen především pro relaxaci, uvolnění a příjemný pocit odpočinku po náročném dni nebo fyzické aktivitě. Zážitek z kompresní masáže se může lišit od klasické ruční masáže.

Je používání přístroje bezpečné?

Při používání podle tohoto návodu a při dodržení uvedených upozornění je přístroj určen pro bezpečné domácí použití. Pokud si nejste jisti, zda je pro vás vhodný, doporučujeme poradit se s lékařem.

Je přístroj zdravotnickým prostředkem?

Ne. Tento výrobek není zdravotnickým prostředkem. Je určen výhradně pro domácí kompresní masáž a relaxaci. Není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci onemocnění.

Splňuje přístroj požadované normy?

Ano. Přístroj splňuje příslušné evropské požadavky a normy vztahující se na výrobky tohoto typu.

Může přístroj používat více osob?

Ano. Přístroj může používat více členů domácnosti. Z hygienických důvodů doporučujeme používat návleky přes tenkou vrstvu oblečení a udržovat je v čistotě podle pokynů uvedených v návodu.

Je přístroj odolný proti vodě?

Ne. Přístroj, ovladač ani napájecí adaptér nejsou vodotěsné. Nepoužívejte je v blízkosti vody ani ve vlhkém prostředí a nikdy je neponořujte do vody.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pravidelná péče pomáhá udržet přístroj v dobrém stavu a prodlužuje jeho životnost.

Čištění přístroje

1. Před čištěním vždy přístroj vypněte a odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky.
2. Povrch ovladače, vzduchových návleků i hadic otřete měkkým, suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem.
3. Pokud je to potřeba, můžete použít malé množství jemného čisticího prostředku určeného pro běžnou údržbu plastových povrchů.
4. Po očištění nechte všechny části přirozeně oschnout.

Čemu se vyhnout

- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, drátěnky ani agresivní chemikálie.
- Přístroj, ovladač ani napájecí adaptér nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
- Zabraňte vniknutí vody nebo čisticích prostředků do konektorů, ovladače a napájecího adaptéru.
- Vzduchové hadice neohýbejte pod ostrým úhlem a nevystavujte je nadměrnému tahu.

Skladování

- Přístroj skladujte na suchém a čistém místě mimo přímé sluneční záření.
- Vyhněte se prostředí s vysokou vlhkostí nebo extrémními teplotami.
- Vzduchové hadice i napájecí kabel ukládejte volně, bez přelomení nebo silného stlačení.
- Před delším uložením doporučujeme návleky lehce rozepnout, aby nebyly zbytečně dlouhodobě stlačené.

Pravidelná kontrola

Před každým použitím doporučujeme zkontrolovat:

- zda nejsou poškozené vzduchové hadice,
- zda jsou konektory správně připojené,
- zda není poškozen napájecí kabel nebo adaptér,
- zda jsou suché zipy čisté a dobře drží.

Pokud zjistíte viditelné poškození některé části přístroje, přístroj dále nepoužívejte, dokud nebude závada odstraněna.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

beautyrelax

 **PO - PÁ 11:00 - 18:00**
(420) 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní přístroj AIRFLOW ULTIMATE

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-3177**

EAN: **8594166124721**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je **ve shodě** s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2006+A1: 2009+A2: 2011 EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013 EN 55014-2: 2015

Přístroj není zdravotnický prostředek.

Není určen pro léčbu žádného onemocnění.

Slouží pro sportovní rekondiční masáž za účelem uvolnění svalů
na vybraných částech těla.

Přístroj spadá do kategorie masážních přístrojů - TARIC 90191010

Při komerčním použití je třeba klást důraz na hygienu provozu přístroje.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno

Dne: 1.4.2026