

NÁVOD K OBSLUZE

Krční masážní přístroj **BeautyRelax BR-1720**

TENS EMS ELEGANCE



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	5
NEBEZPEČÍ	5
VÝSTRAHA	5
RIZIKO	6
UPOZORNĚNÍ	6
VAROVÁNÍ	7
DŮLEŽITÁ VÝSTRAHA	8
KONTRAINDIKACE	8
ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ	8
LYMFATICKÉ UZLINY	9
TECHNICKÉ PARAMETRY	12
OBSAH BALENÍ	12
HLAVNÍ VÝHODY	13
PROBLEMATIKA BOLESTI KRČNÍ PÁTEŘE	14
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	15
MASÁŽ EMS	15
INFRAČERVENÉ VYHŘÍVÁNÍ	15
MAGNETOTERAPIE	15
POPIS PŘÍSTROJE	16
POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	17
VÝZNAM FUNKCÍ OVLADAČE	18
POUŽITÍ GELOVÝCH ELEKTROD	19
ŽIVOTNOST GELOVÉ ELEKTRODY	19
POUŽITÍ SONOGELU	19
MOŽNOSTI APLIKACE GELOVÝCH ELEKTROD	20
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	22
ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	23
NABÍJENÍ BATERIE	24
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	24
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	25
CERTIFIKACE	25
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	26

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Věnujte prosím čas následujícím instrukcím, aby bylo používání přístroje správné a bezpečné.

NEBEZPEČÍ

Nalepovací gelové elektrody je zakázáno používat, pokud současně používáte tyto přístroje:

1. Lékařské elektronické přístroje (např. kardiostimulátor).
2. Lékařské elektronické přístroje, které podporují životní funkce (např. umělé srdce, plíce, játra, apod.).
3. Jiné lékařské přístroje (např. elektrokardiograf).



VÝSTRAHA

Pokud trpíte následujícími zdravotními příznaky, ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékařskou pomoc:

1. Akutní potíže
2. Srdeční problémy
3. Vysoké horečky
4. Těhotenství
5. Zhoubné nádory
6. Trvalý nízký nebo vysoký krevní tlak
7. Infikovaná rána nebo podobné vážné zranění
8. Alergické kožní problémy
9. Podrobení se lékařské diagnostické terapii
10. Nepříjemná souvislá bolest svalů v důsledku jejich nadměrného přetížení



Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů, je zakázáno přístroj používat.

RIZIKO

1. Je zakázáno umísťovat nalepovací gelové elektrody na oblast srdce, krku, hlavy, do oblasti genitálií. Gelové elektrody nepoužívejte na oblasti, které trpí kožními chorobami nebo odřeninami.
2. Přístroj se nesmí používat v kombinaci s jinými lékařskými přístroji. Před používáním nepoužívejte krémy nebo spreje. Mohlo by dojít k poškození pokožky.
3. Přístroj používejte podle přesně daných pokynů v tomto návodu. Přístroj se nesmí používat k jiným účelům než tlumení svalové bolesti a napětí.
4. Nalepovací gelové elektrody, které jsou součástí balení, nepřipojujte do jiného zařízení nebo dokonce napřímo do zdroje elektrického proudu 220V. Příložený kabel zapojte pouze do zdířky k tomu určené na krčním masážním přístroji.
5. Přístroj sami neopravujte, nerozebírejte, nedemontujte žádnou z jeho součástí. Záruka by tím ztratila platnost a za případně způsobené škody na zdraví či majetku bychom nepřijímali žádnou zodpovědnost.
6. Bez předchozího pečlivého prostudování tohoto návodu k obsluze se nesmí přístroj používat.



UPOZORNĚNÍ

1. Pokud se necítíte při používání přístroje dobře, udělá se vám nevolno nebo se vyskytnou nečekané zdravotní komplikace, činnost přístroje okamžitě zastavte a další použití konzultujte se svým lékařem.
2. Pokud chcete gelovou elektrodu umístit na jinou část těla, nejprve činnost přístroje vypněte. Poté můžete bezpečně elektrodu přesunout a přístroj znovu zapnout.
3. Vzhledem k zajištění maximální účinnosti přístroje vypněte veškerá elektronická zařízení, která případně používáte (MP3 přehrávač, mobilní telefon při telefonování).
4. Přístroj se nesmí používat ve spánku, kdy nejste schopni mít přístroj plně pod kontrolou. Mohlo by dojít k vážnému zranění.
5. Gelové elektrody nepoužívejte na jednom místě déle než 30 minut.
6. Dbejte na to, aby se během používání elektroda nedostala do kontaktu s kovovými vodivými předměty (řetízky, náramky, prsteny, ...)




VAROVÁNÍ

1. Gelové elektrody nenalepujte na tělo v blízkosti srdce, v oblasti úst nebo na podrážděnou pokožku
2. Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí
3. Za určitých okolností je možné přístroj používat pouze na účasti fyzioterapeuta
4. Přístroj je určen pouze k vnějšímu použití
5. Produkt po skončení životnosti nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Zlikvidujte ekologicky ve sběrném dvoře v okolí vašeho bydliště.
6. Přístroj mohou používat pouze osoby starší 16 let.

Poznámka: Krční masážní přístroj slouží pro rekondiční masáž se zaměřením na oblast krku, šíje a popřípadě ramen (v případě použití nalepovacích gelových elektrody). Přístroj není zdravotnický prostředek. Pokud jste po operaci krční páteře nebo trpíte opravdu vážným chronickým onemocněním svalů krční páteře, použití přístroje konzultujte se svým praktickým lékařem nebo fyzioterapeutem.

Velmi pečlivě dbejte o úroveň intenzity elektrických impulzů pro jednotlivé oblasti těla. Vždy začněte nejprve od nejnižší hodnoty, tj. od hodnoty 1. Intenzitu masáže zvyšujte pomalu a POSTUPNĚ! Pokud budete cítit, že vám aktuálně nastavená intenzita není příjemná, snižte ji nebo přístroj VYPNĚTE!

DŮLEŽITÁ VÝSTRAHA

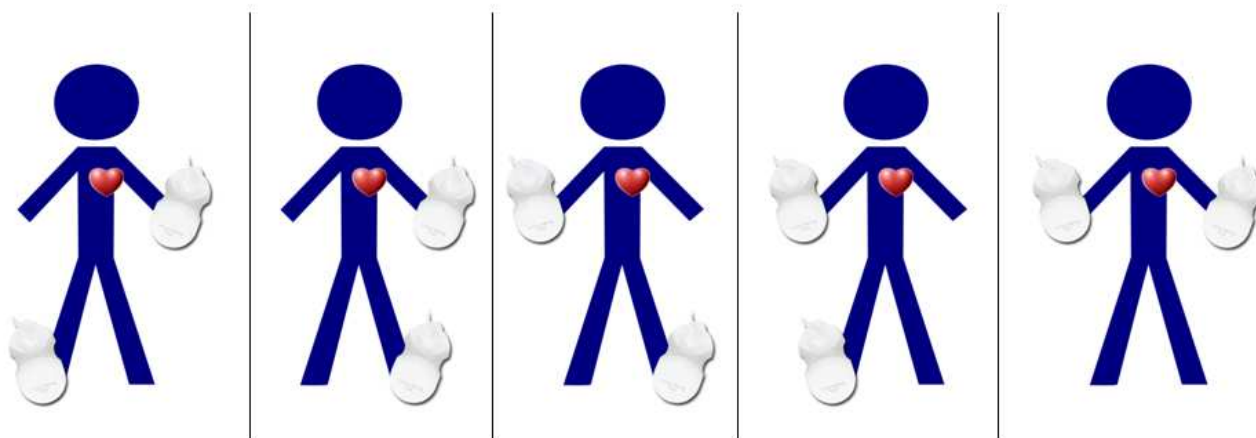

Gelové elektrody nikdy nenalepujte na tělo ve výše zobrazených kombinacích. Elektrické impulzy by proudily přímo přes srdce, což je striktně zakázáno!

KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, které trpí některým z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, cukrovka, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Vysoký cholesterol
- Kožní onemocnění
- Únavový syndrom
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Cévní poruchy nebo arterioskleróza
- Těhotenství
- Menstruace
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ


Gelové elektrody nikdy neaplikujte na tyto tělesné partie:

- Hlava, oblast, kde je srdce
- Podpaží
- Kotník
- Dlaně
- Zákolenní oblast
- Páteř




LYMFATICKÉ UZLINY

Při použití přístroje **Beautyrelax** se **vyhněte** těmto oblastem lymfatických uzlin. Umístění nalepovacích elektrod je v těchto oblastech **přísně zakázáno**. Oblasti těla, na které se zákaz vztahuje, jsou zobrazeny **velkými zelenými tečkami**:

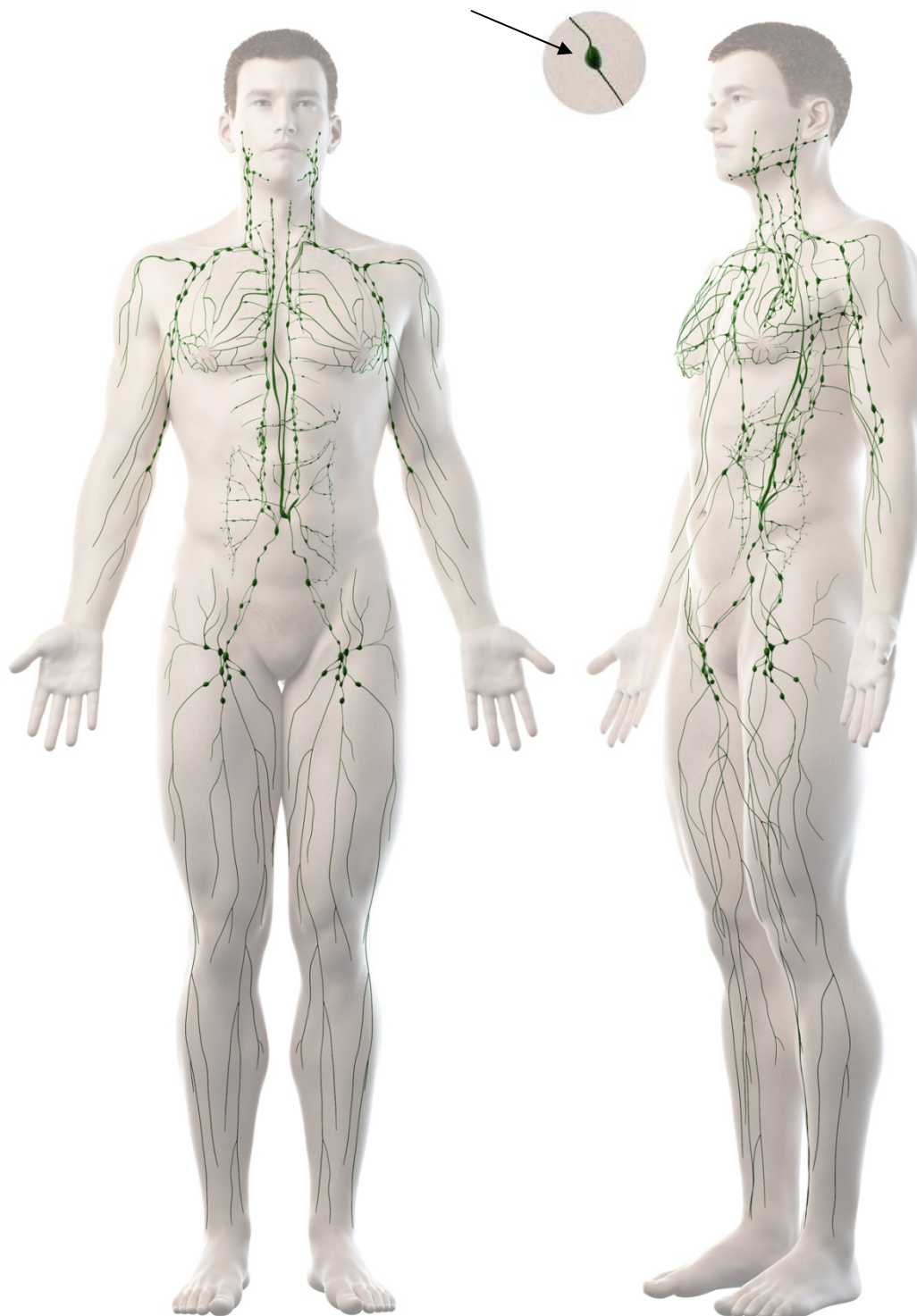


LYMFATICKÉ UZLINY

Při použití přístroje **Beautyrelax** se **vyhněte** těmto oblastem lymfatických uzlin. Umístění nalepovacích elektrod je v těchto oblastech **přísně zakázáno**. Oblasti těla, na které se zákaz vztahuje, jsou zobrazeny **velkými zelenými tečkami**:

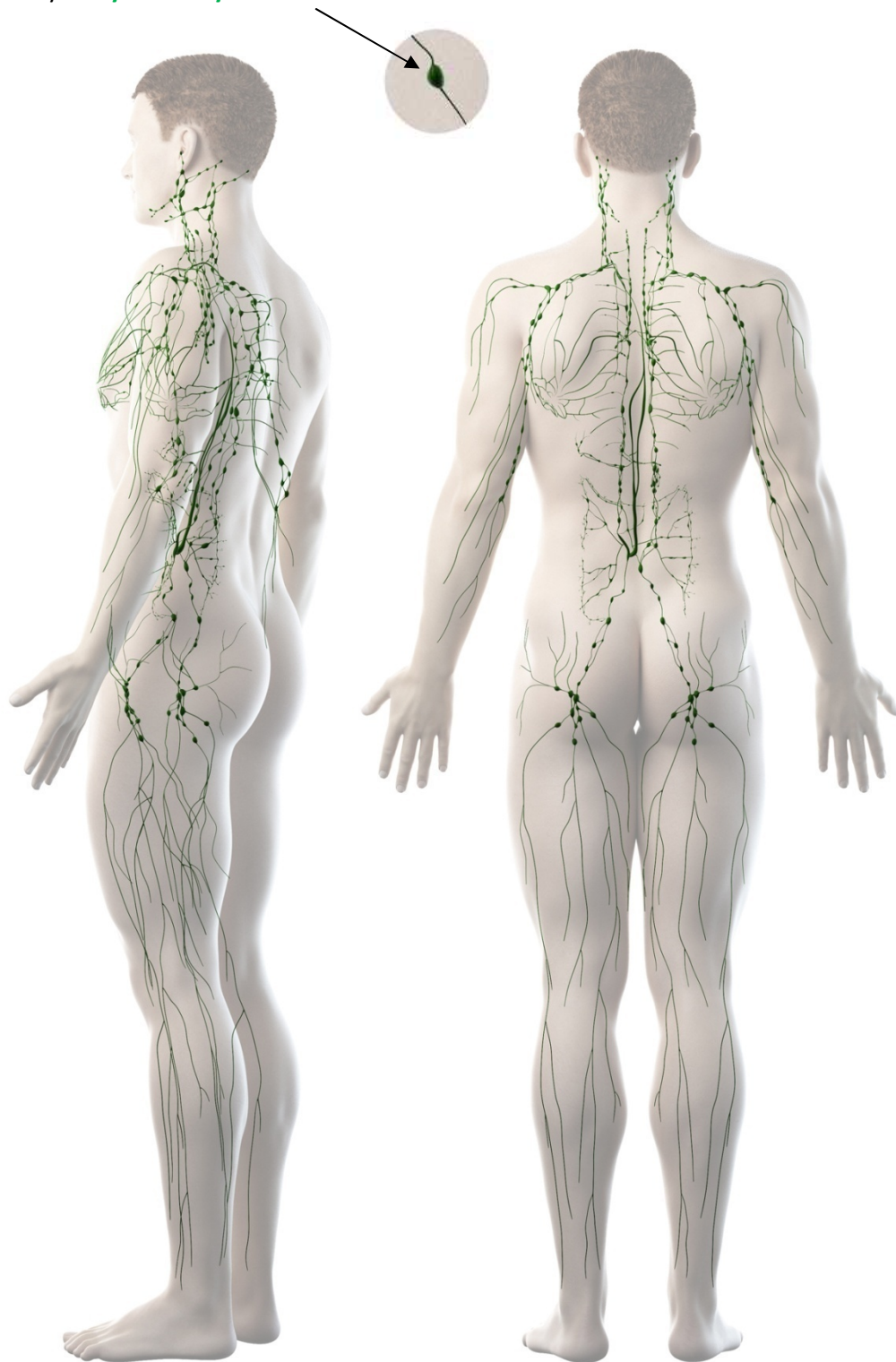

LYMFATICKÉ UZLINY

Při použití přístroje **Beautyrelax** se **vyhněte** těmto oblastem lymfatických uzlin. Umístění nalepovacích elektrod je v těchto oblastech **přísně zakázáno**. Oblasti těla, na které se zákaz vztahuje, jsou zobrazeny **velkými zelenými tečkami**:

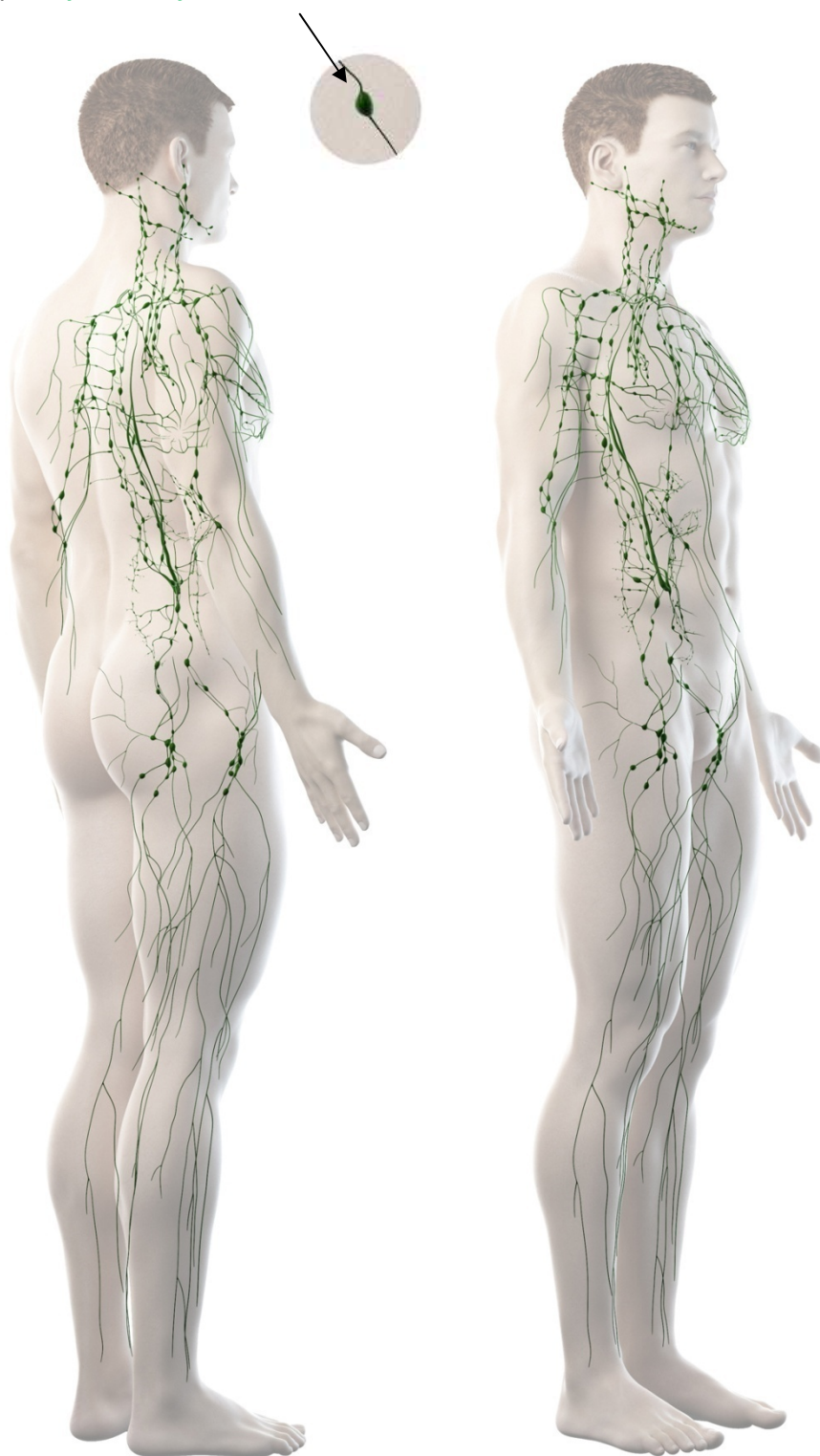

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Možnost nastavení funkce tepla: ano
- Ovládání: dálkový ovladač
- Nabíjecí napětí: 5V
- Kapacita baterie: 1200mAh 3,7V
- Napájení: USB kabelem (součástí balení)
- Rozměry: 20x19x10cm
- Hmotnost: 590g

OBSAH BALENÍ

- Krční masážní přístroj BeautyRelax TENS EMS ELEGANCE
- Dvě gelové elektrody
- Kabel pro připojení elektrod
- Dálkový ovladač
- Nabíjecí USB kabel
- Návod k obsluze



HLAVNÍ VÝHODY

- Uvolnění oblasti kru, šíje a krční páteře
- Napomáhá dosáhnout vytouženého uvolnění krčních svalů
- Infračervené vyhřívání výrazně eliminuje svalovou únavu
- Zlepšení prokrvení bolestivých míst a látkovou výměnu
- Přizpůsobí se každé velikosti krku
- Ovládání pomocí bezdrátového ovladače
- Velký LCD displej ovladače
- Časovač s funkcí automatického vypnutí
- 6 automatických masážních programů
- 15 úrovní intenzity masáže
- 2 gelové elektrody pro stimulaci vybrané části těla



stimulace EMS pulzy



4 kontaktní plochy



magnetoterapie



infračervené vyhřívání



bezdrátové ovládání



ergonomický design



rychlé nabíjení baterie



snadné přizpůsobení krku



gelové elektrody

PROBLEMATIKA BOLESTI KRČNÍ PÁTEŘE

Krční páteř patří mezi nejvíce namáhanou část páteře. Bolest může být způsobena nejrůznějšími aktivitami jak ve dne, tak i v průběhu spánku. Přetížení a špatné držení hlavy, dlouhotrvající práce vsedě s předkloněnou hlavou, prudké zastavení v autě či špatná poloha spánku. Krátký výčet z celé řady faktorů, které negativně působí na krční páteř. Tupá bolest za krkem může postupně vystřelovat až k ramenům a dále k lopatkám. Krční páteř bývá často zdrojem bolesti hlavy. Pokud bolest krční páteře žádným způsobem neřešíme, může dojít až k její blokádě.

Naštěstí již existují velmi účinné relaxační přístroje, díky kterým lze proti bolesti krční páteře úspěšně bojovat. Krční masážní přístroj BeautyRelax TENS EMS ELEGANCE kombinuje hned několik technologií najednou:

1. Masáž EMS (terapie elektrickými pulzy)
2. Infračervené vyhřívání
3. Magnetoterapie




PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax TENS EMS ELEGANCE je inovativní masážní přístroj, který kombinuje moderní technologie pro účinné a hlavně okamžité uvolnění svalů v oblasti krční páteře. 4 kontaktní aplikátory pokryjí celou plochu krku. Elektrické mikropulzy, infračervené teplo a magnetoterapie působí blahodárným relaxačním účinkem. Límec se přizpůsobí každému uživateli. Nastavení funkcí pomocí dálkového ovladače. Bezdrátové použití díky nabíjecí baterii s velkou kapacitou.


MASÁŽ EMS

Elektrická nervová stimulace je aplikace elektrického proudu s cílem zmírnit bolest. Elektrické pulzy se přenášejí na vybranou oblast. Mírný elektrický proud prochází skrz kůži. Používá se bezpečné malé napětí. Nízkofrekvenční impulzy jsou srovnatelné s přirozenou bioelektrinou. Stimulací nervových buněk roztahuje a smršťuje svaly. Výrazně se zlepšuje průtok krve. Zvyšuje se přísun živin, které jsou nezbytné k rekonvalescenci svalů a uvolnění jejich napětí. Možnost nastavení 15 úrovní intenzity a 6 automatických masážních programů.

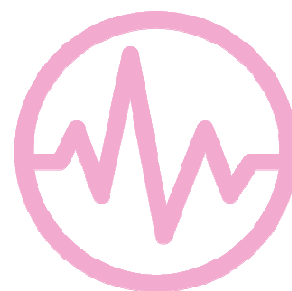


INFRAČERVENÉ VYHŘÍVÁNÍ

Infračervené záření patří mezi nejúčinnější technologii prohřátí svalů. Infračervené záření má vlnovou délku větší než viditelné světlo. Je součástí záření, které vysílá i slunce. Tento způsob prohřívání proniká hluboko do tkáně. Teplo se nepřenášejí jen na pokožku, ale přímo ke svalům. Působením tepla dochází k rychlejšímu uvolnění ztuhlých svalů.

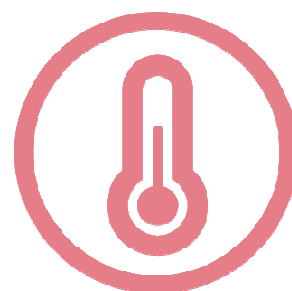





MAGNETOTERAPIE

Magnety produkují magnetické pole o nízké indukci, které působí na vybranou oblast těla. Pozitivně ovlivňuje fungování jednotlivých buněk. Magnetické pole působí rovněž na kapilární stěny, okolní svalové a pojivové tkáně, čímž dochází ke zlepšení krevního oběhu. Celkově podporuje odvod zplodin látkové výměny (základní předpoklad pro každý ozdravný proces). Magnetoterapie tlumí bolest, otoky a záněty. Výrazně urychluje regeneraci. Napomáhá zmírnit svalovou bolest.

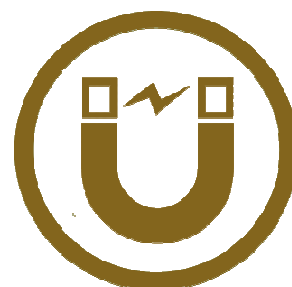


Poznámka: magnetoterapie se žádným způsobem neaktivuje pomocí dálkového ovládání nebo tlačítek na masážním přístroji. Magnety jsou zabudované uvnitř krčního masážního přístroje a působí vždy automaticky při nasazení masážního límce na krk.

POPIS PŘÍSTROJE

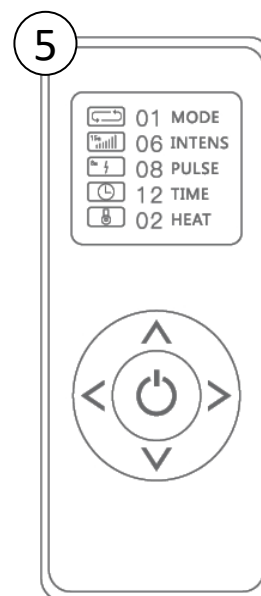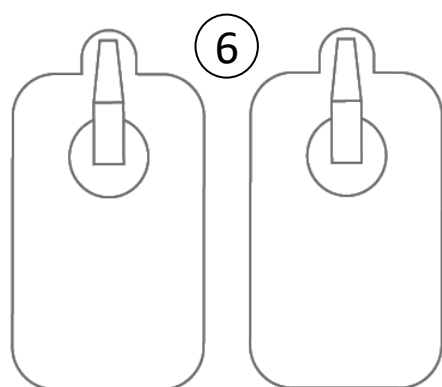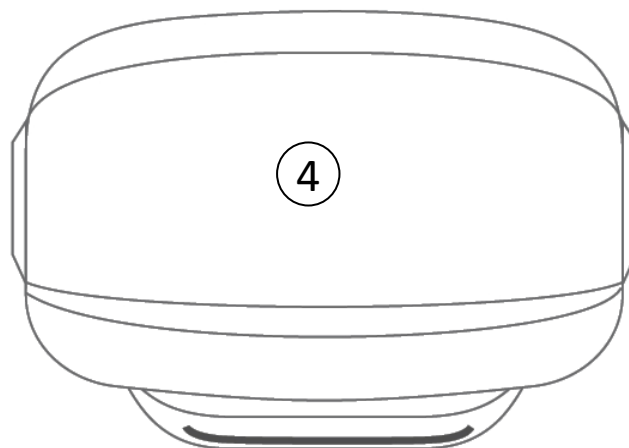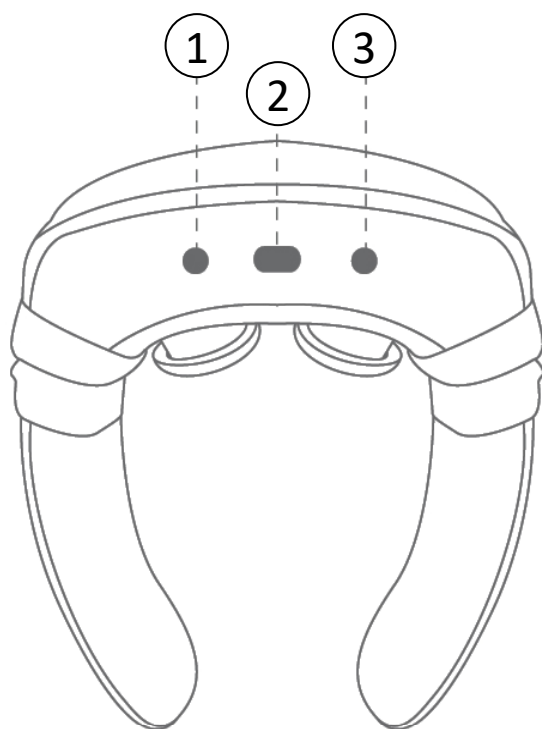

- 1. Vstup pro napájecí kabel
- 2. Tlačítko ON/OFF
- 3. Výstup pro kabel nalepovacích elektrod
- 4. Zadní strana přístroje
- 5. Dálkové ovládání
- 6. Nalepovací gelové elektrody

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

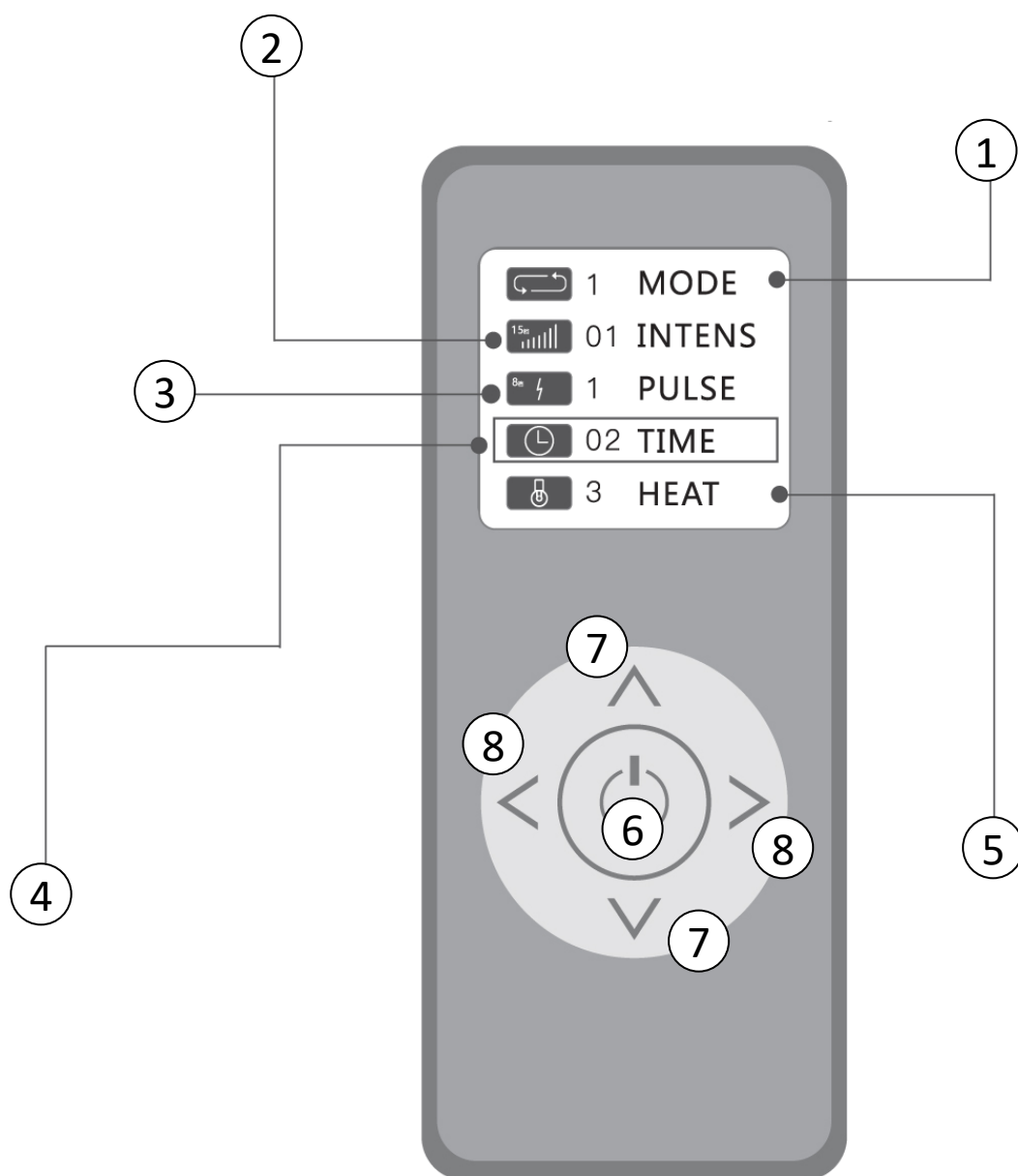

- 1. Masážní **MÓD**
- 2. **INTENZITA** masáže
- 3. **PULZY**
- 4. **ČASOVAČ**
- 5. **VYHŘÍVÁNÍ**
- 6. Tlačítko **ON/OFF**
- 7. Tlačítko změna funkce v nabídce
- 8. Tlačítko posun vpřed/vzad/zvýšení/snížení

VÝZNAM FUNKCÍ OVLADAČE

Pomocí dálkového ovladače můžete nastavit všechny funkce krčního masážního přístroje. Průběh nastavení všech funkcí je zobrazen na LCD displeji. Význam jednotlivých položek v nabídce je následující:

MODE

K dispozici je celkem 6 masážních programů. Programy mají číselné označení 1,2,3,4,5,6. Na displeji jsou programy zobrazeny pod názvem **MODE**. Každý masážní program má různou frekvenci a tempo elektrických pulzů. Díky tomu není používání krčního masážního přístroje monotónní. Masážní program si můžete během používání přístroje snadno měnit.

1. střídání programů **MASSAGE + SCRAPPING + ACUPUNCTURE** (změna proběhne každých 30 sekund)
2. střídání programů **ACUPUNCTURE + TAPPING + MASSAGE** (změna proběhne každých 30 sekund)
3. **SCRAPPING** („škrábání“)
4. **MASSAGE** („masáž“)
5. **TAPPING** („poklepávání“)
6. **ACUPUNCTURE** („akupunktura“)

INTENS

Krční masážní přístroj nabízí 15 úrovní intenzity působení elektrických pulzů. Díky tomu se přizpůsobí každému uživateli. Lidé mají různou citlivost pleti, různou vrstvu podkožního tuku. Proto je vhodné dávkovat intenzitu elektrických pulzů do několika výkonových úrovní. Začínějte vždy na nejnižší hodnotě 1. Zvyšujte se zvýšenou opatrností. Vnímejte, jak na vás elektrické pulzy působí. Jakou silou stimulují svaly. Pocitově si nastavte takovou úroveň výkonu, která vám bude příjemná, ale zároveň efektivní. Intenzita má číselné označení na displeji 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.

PULSE

Můžete si ručně nastavit úroveň elektrických pulzů. K dispozici je celkem 8 úrovní. Působení elektrických pulzů mají na displeji číselné označení 1,2,3,4,5,6,7,8. Nastavte si tak, aby pro vás masáž byla co nejvíce komfortní.

TIME

Pomocí dálkového ovladače si můžete nastavit čas masáže. Po uplynutí nastaveného času se masáž přístroje vypne. Můžete si nastavit časový rozsah od 1 do 30 minut. Maximální doporučená délka ošetření je 30 minut za den.


HEAT

Krční masážní přístroj je vybaven funkcí vyhřívání. Působení tepla sehraává pro rehabilitaci zatuhlých svalů důležitou roli. Prohřáté svaly mají lepší schopnost rychleji se uvolnit a regenerovat. K dispozici je více úrovní. Působení tepla si tak můžete dávkovat přesně podle vašich potřeb. Na displeji jsou jednotlivé úrovně zobrazeny takto:

0 - vypnuto, **1** - nízká úroveň tepla, **2** - střední úroveň tepla, **3** - vysoká úroveň tepla. Pokud se s přístrojem teprve seznamujete, při prvních použití zvolte nejprve nízkou úroveň 1. Přidávejte postupně o jednu úroveň nahoru a vyčkejte, jak budete působení tepla vnímat.

POUŽITÍ GELOVÝCH ELEKTROD

Krční masážní přístroj má rozšířenou funkci stimulace vybrané části těla pomocí gelových elektrod. Součástí balení jsou 2 gelové elektrody a kabel, kterým propojíte gelové elektrody s přístrojem. Tato možnost vytvoří z vašeho krčního masážního přístroje plnohodnotný přístroj pro EMS stimulaci svalů pomocí elektrických pulzů.

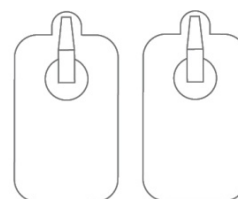


ŽIVOTNOST GELOVÉ ELEKTRODY

Gelové elektrody mají omezenou životnost. Konec životnosti se projeví tak, že již není možné elektrodu pevně nalepit na tělo. Elektroda ztratí vlastnost pevně držet na pleti. Počet cyklů použití elektrody není možné přesně stanovit. Pokud s elektrodou pracujete neopatrně a např. po pádu na zem na lepicí straně ulpí velké množství nečistot, elektroda ztratí schopnost držet pevně na pleti. Kondice lepicí strany elektrody výrazně ovlivňuje efektivitu přenosu elektrických pulzů ke svalům. Pokud životnost elektrody skončí a na pokožce již pevně nedrží, je třeba ji vyměnit za novou. Kontaktujte prodejce s možností zakoupení nové sady elektrod.




POUŽITÍ SONOGELU

Na vnitřní straně přístroje jsou umístěny 4 kontaktní plochy. Tyto oválné elektrody jsou v kontaktu s pletí. Hlavním smyslem je přenos elektrických pulzů. Stimulace svalů pomocí elektrických pulzů EMS patří mezi neinvazivní technologii. Při použití technologie je třeba zvýšit vlhkost pleti. Pro hydrataci pleti je optimální použití tenké vrstvičky sonogelu. Kontaktní gel vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi kontaktními elektrodami a pokožkou. V krajním případě můžete nanést menší množství vody. Kontaktní gel je však lepší, protože z pleti neztéká. Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakémkoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně).

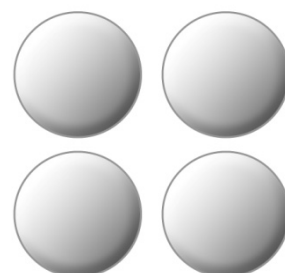

MOŽNOSTI APLIKACE GELOVÝCH ELEKTROD

Příklady aplikace gelových elektrod. **Obrázky jsou ilustrační při použití s jiným modelem.** Mají informativní charakter. Hlavní význam je znázornění různých možností použití.

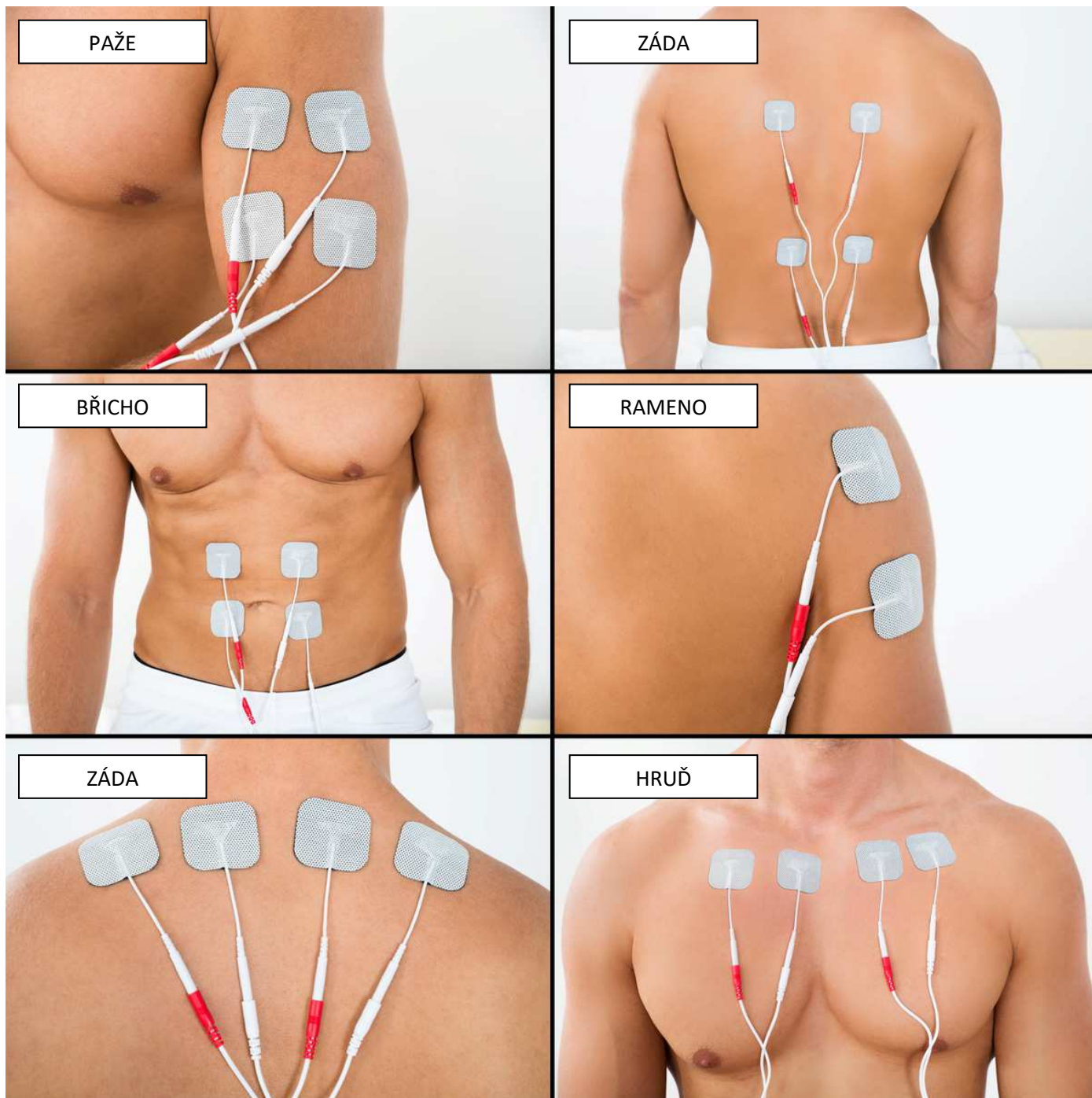

MOŽNOSTI APLIKACE GELOVÝCH ELEKTROD

Příklady aplikace gelových elektrod. **Obrázky jsou ilustrační při použití s jiným modelem.** Mají informativní charakter. Hlavní význam je znázornění různých možností použití.




1. Koleno
2. Paže
3. Paže
4. Krk + ramena
5. Bedra
6. Krk + ramena
7. Rameno
8. Krk + ramena
9. Rameno
10. Krk + ramena
11. Záda

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Přepněte tlačítko ON/OFF do polohy ON. Na přístroji se rozsvítí modré kolečko na zadní straně.


Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu.

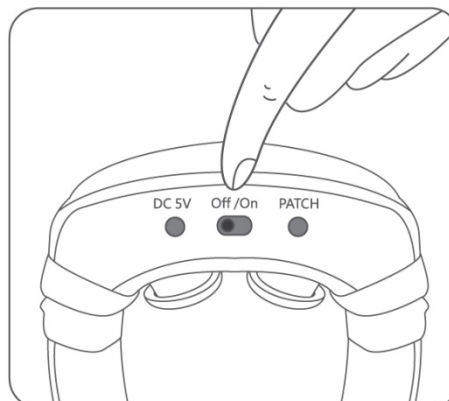


- 2.** Nasadte přístroj na krk dle grafické vizualizace.



- 3.** Na ovladači stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítek na ovladači si můžete nastavit jednotlivé funkce přístroje. Ovladač můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka .

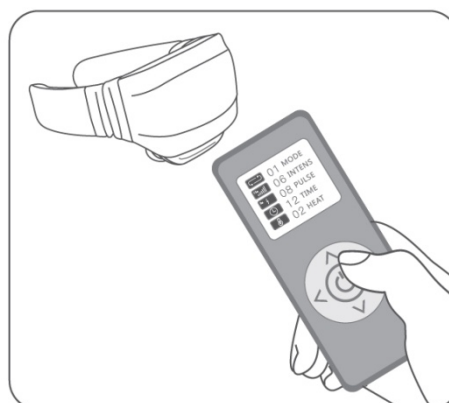

- 4.** Dálkovým ovladačem si můžete upravit činnost přístroje. Pomocí tlačítek   si můžete upravit jednotlivé funkce masážního přístroje. Pomocí šípek   můžete upravit hodnotu konkrétní funkce.

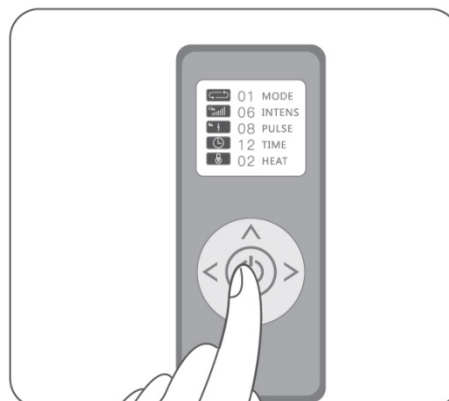

ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Zkontrolujte	Řešení
Z elektrod nejdou žádné impulzy, masáž neprobíhá	Zkontrolujte, zda nejsou na gelových elektrodách nalepeny nečistoty.	Nečistoty odstraňte nebo vyměňte elektrodu za novou.
	Zkontrolujte, zda není baterie přístroje vybita. Stav baterie signalizuje na displeji ikona baterie.	Baterii nabijte.
	Přístroj není zapnutý.	Přístroj zapněte posunutím tlačítka ON/OFF.
Stimulace impulzy je velmi slabá nebo žádná.	Zkontrolujte, zda jsou elektrody správně připojeny.	Konektor drátku pevně přimáčkněte k elektrodě.
	Zkontrolujte, zda jste z elektrody odstranili ochrannou fólii.	Fólii z elektrody odlepte.
	Zkontrolujte, zda jsou elektrody přilepeny pouze na pokožku.	Elektrodu odlepte, odstraňte cizí předměty a poté znovu nalepte.
	Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.	Baterii nabijte.
Pokožka v místě používání zčervená nebo nepříjemně svědí.	Příliš dlouhá doba používání.	Dobu používání zkraťte.
	Konzultujte se svým lékařem, zda se nemůže jednat o alergickou reakci.	Pokud je reakce pokožky mírná, stačí pouze změnit polohu elektrod. Pokud je silná, přístroj nepoužívejte a navštivte svého alergologa.
	Zkontrolujte, zda jsou elektrody v těsném kontaktu s pokožkou.	Elektrody přitiskněte pevně k pokožce.
	Zkontrolujte, zda nejsou na elektrodách nečistoty.	Elektrody vyčistěte nebo vyměňte za nové.
	Po čištění zkontrolujte, že jsou elektrody suché.	Elektrody pečlivě vysušte, nebo vyměňte za nové.
	Zkontrolujte, zda není gel elektrod poškozen.	Poškozenou elektrodu vyměňte.
Během používání přístroje se elektrické impulzy zeslabí nebo se úplně přeruší.	Zkontrolujte, zda nedošlo během používání k uvolnění elektrody od drátku.	Přístroj vypněte a elektrodu k drátku správně připevněte.
	Zkontrolujte, zda není poškozen vodící kabel.	Použijte kabel nový.
	Přístroj se automaticky vypnul, protože přednastavená doba masáže.	Přístroj znovu zapněte a nastavte si nový cyklus masáže.
Přestože intenzitu masáže zvýšíte, stimulace je velmi slabá nebo dokonce žádná.	Zkontrolujte, zda nejsou na pokožce nečistoty.	Pokožku důkladně očistěte a osušte.
	Zkontrolujte správnou polohu, ve které jsou elektrody k pokožce přiloženy.	Polohu elektrod upravte.
	Zkontrolujte správnost polohy přiložení elektrod.	Elektrody na tělo připevněte na tělo tak, aby byly v plném rozsahu přilepeny k pleti.
	Zkontrolujte, zda není baterie vybita.	Baterii nabijte.


NABÍJENÍ BATERIE

Krční masážní přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii.

Upozornění: Nabíjecí kabel nepřipojujte k síťovému adaptéru 220V. Mohlo by dojít k poškození baterie a ztrátě záruky. Jako zdroj energie využijte pouze USB port počítače nebo notebooku.

Postup nabíjení:

1. Před zahájením nabíjení přepněte tlačítko ON/OFF do pozice ON.
2. Vložte do příslušného vstupu napájecí USB kabel
3. Druhý konec kabelu připojte do USB portu počítače nebo notebooku.
4. Průběh nabíjení baterie je doprovázen červenou světelnou signalizací
5. Jakmile je baterie nabitá, světelná signalizace svítí modře.
6. Po skončení procesu nabíjení baterie odpojte nabíjecí USB kabel z přístroje a přepněte tlačítko ON/OFF do polohy OFF.
7. Délka nabíjení může trvat až 2 hodiny.
8. Životnost baterie se pohybuje přibližně v rozsahu od 2 do 4 hodin (nejdelší životnost baterie na jedno nabití platí vždy při nejmenší intenzitě působení elektrických pulzů).

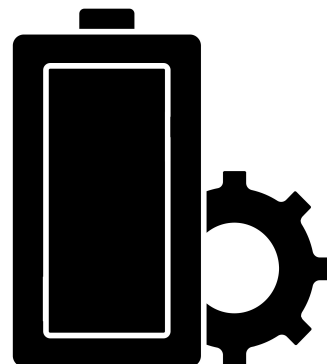

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pokud krční masážní přístroj používáte s aplikací kontaktního sonogelu, po skončení vždy pečlivě otřete gel ze všech 4 kontaktních elektrod. Kontaktní elektrody dokonale osušte. Z dlouhodobého hlediska tím výrazně prodloužíte jejich životnost. Pro čištění hlavní jednotky přístroje nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Povrch udržujte pouze pomocí jemně navlhčeného hadříku. Utřete závěrem veškerou vlhkost do sucha. Gelové nalepovací elektrody žádným způsobem nečistěte. Jakýkoliv kontakt s lepkou částí elektrody by vedl k přenosu nečistot a znehodnocení elektrody. Pokud používá přístroj více osob, doporučujeme, aby každý uživatel používal vlastní sadu gelových elektrod. Zabrání tak případnému přenosu bakterií či kožních onemocnění.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Krční masážní přístroj TENS EMS ELEGANCE

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-1710, BR-1720**

EAN: **8594166118454;8594166118461**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015

EN 62233:2008

Podrobnosti jsou uvedeny v test reportu číslo: UNIA2018013131SR-01

Produkt není zdravotnický prostředek.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.4.2021